

Ortho CP-GU

PELÍCULA

Película universal de alta sensibilidad, que proporciona imágenes de gran calidad en todas las condiciones de procesado. La Ortho CP-GU es una película universal, sensible al verde, con sistema de alta sensibilidad.

- Película de alta sensibilidad, sensible al verde
- Miembro de la familia CP de películas Agfa
- Elevado contraste, reducido velo y bajo nivel de ruido
- Adaptada para numerosas aplicaciones
- Procesado estándar de 90 segundos
- Visualización excelente en todos los valores de densidad
- Imágenes de gran calidad en todas las condiciones de procesado

Película radiográfica universal de alta velocidad, sensible al verde

Ortho CP-GU es una película radiográfica ordinaria diseñada para uso radiológico general en combinación con pantallas de refuerzo de emisión en verde. Esta película puede emplearse con sistemas de película/pantalla de alta velocidad y en cualquier tipo de procesamiento, y mantiene una calidad alta y constante de imagen.





Diseñada para un gran número de aplicaciones

La curva característica de la Ortho CP-GU se ha concebido expresamente para que constituya una película universal. Un elevado contraste en las zonas de la imagen de baja densidad y un contraste suficiente en la mitad y en el hombro de la curva garantizan una visualización excelente de los distintos valores de densidad. Ello significa que la película Ortho CP-GU muestra el grado de detalle requerido en zonas de alta densidad como estructuras óseas o angiografías, presentando con claridad zonas de densidad media como estructuras del campo pulmonar e imágenes nítidas en zonas de baja densidad, como son el diafragma y las regiones retrocardíaca, mediastinal y vertebral. Gracias a su elevado contraste, reducido velo y bajo nivel de ruido, la Ortho CP-GU facilita la rápida lectura de la información buscada.

Calidad de imagen constante en todas las condiciones de procesado

La tecnología de emulsión única de Agfa mantiene la calidad de la imagen siempre excelente, incluso cuando se trata la película con productos químicos más débiles o en condiciones menos favorables.

Toda la familia CP de películas Agfa para elegir

Seleccione, entre la familia CP de películas Agfa, la que mejor se ajuste a sus necesidades específicas.

- CP-BU NEW film - película universal sensible al azul
- CP-BU M film - película universal sensible al azul
- Ortho CP-G Plus film - película universal sensible al verde
- Ortho CP-GU film - película universal sensible al verde
- Ortho CP-GU M film - película universal sensible al verde

Existen, además, pantallas concebidas especialmente para estas películas.

Características técnicas

GENERALIDADES

Requisitos de luz de seguridad

- Se recomienda usar un filtro especial rojo para luz de seguridad, que ha de emplearse conjuntamente con una bombilla opaca de 15 watt y colocarse al menos a 1,2 m de la zona de carga/descarga y de la bandeja del revelador

Tratamiento

- La película Ortho CP-GU se ha concebido para los tratamientos RP, ampliado y manual
- Se recomienda emplear las soluciones de revelado y fijado de Agfa

Manipulación

- La película debe manipularse con cuidado
- Evite arrugar, doblar o ejercer cualquier presión física sobre la película

Conservación

- Las películas sin abrir y vírgenes deben guardarse a una temperatura entre 4 y 25° C en un lugar seco
- Además, la película se tiene que proteger de cualquier fuente de radiación de iones


Embalaje

- La película Ortho CP-GU está disponible en todos los formatos acostumbrados en embalajes de 100 hojas
- A pedido se pueden suministrar otros embalajes y formatos

CURVA


Curva sensitométrica

- Tratamiento mecánico a 90 s 34° C con G138i/G334i y pantalla mediana CURIX Ortho

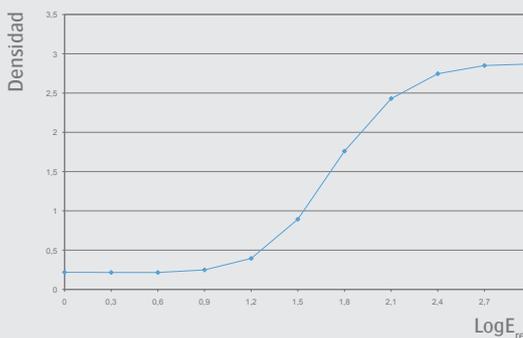

Curva sensibilidad espectral

- Sensibilidad en función de la energía necesita para alcanzar una sensibilidad 1 sobre el velo

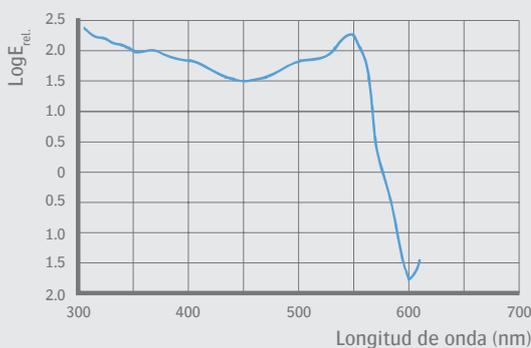

Este símbolo usado en la etiqueta del embalaje significa: abrir únicamente en el cuarto oscuro

Para más información, pónganse en contacto con su representante local de ventas de Agfa.

ORTHO CP-GU

Para más información sobre Agfa, visite nuestra web: www.agfa.com ■

Agfa y el rombo de Agfa son marcas registradas de Agfa-Gevaert NV, Bélgica, o de sus filiales. Reservados todos los derechos. Toda la información incluida se entiende a modo de guía y las características de los productos y servicios descritos en esta publicación pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso. Es probable que no todos los productos y servicios mencionados estén disponibles en su región. Por favor, diríjase a su representante local de ventas para obtener más información sobre la disponibilidad. Agfa-Gevaert NV se esfuerza con ahínco en promocionar una información lo más precisa posible, pero no se hace responsable de los posibles errores tipográficos.

© 2019 Agfa NV
Reservados todos los derechos
Publicado por Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Bélgica

5NT32 ES 00201902