

CP-BU NEW

FILM

Film radiographique sensible au bleu destiné à la radiologie générale. Film universel avec une qualité d'image d'une homogénéité optimale grâce à la technologie disc grain d'Agfa.

- Membre de la famille de films Agfa CP
- Film sensible au bleu de haute sensibilité et de contraste moyen à élevé
- Conçu pour un éventail complet d'applications

Le nouveau film CP-BU NEW est un film radiographique sensible au bleu de haute sensibilité et de contraste moyen à élevé. Il est destiné à être utilisé en radiologie générale avec des écrans renforçateurs aux terres rares et au tungstène de calcium.

Conçu pour un éventail complet d'applications

Le film CP-BU NEW est un film universel grâce à la forme de la courbe caractéristique. D'une part, le

contraste de la partie médiane et de l'épaule de la courbe est suffisamment élevé pour garantir une excellente visualisation de tous les détails pertinents pour des applications telles que l'angiographie et l'examen des structures osseuses. Toutes les structures des poumons aussi sont parfaitement visibles.

D'autre part, la forme du pied a été étudiée de manière à assurer un excellent rendu des zones de faible densité telles que les zones rétrocardiaques et médiastinales ou les zones du diaphragme et de la colonne vertébrale.





Des images d'une grande homogénéité

Le film CP-BU NEW offre une excellente homogénéité : la technologie Disc Grain d'Agfa assure une qualité d'image d'une homogénéité optimale, même lorsque le film est traité dans des produits chimiques affaiblis ou dans des conditions moins favorables. Le CP-BU NEW est aussi très peu sensible aux marques de désensibilisation.

Une lecture aisée, un aspect neutre agréable

L'utilisation d'un support polyester bleu foncé donne à l'image un aspect neutre plaisant, qui facilite la lecture et rend l'image plus agréable à regarder.

La famille de films Agfa CP

La famille de films Agfa CP vous permet de sélectionner le film qui répond le mieux à vos exigences spécifiques.

- Film CP-BU NEW - film universel sensible au bleu
- Film CP-BU M - film universel sensible au bleu
- Film Ortho CP-G Plus - film universel sensible au vert
- Film Ortho CP-GU - film universel sensible au vert
- Film Ortho CP-GU M - film universel sensible au vert

Des écrans spécialement développés pour ces films sont également disponibles.

Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Conditions d'éclairage de la chambre noire

- Il est recommandé d'utiliser un filtre inactinique rouge spécial, placé à au moins 1,2 m de la zone de chargement/déchargement et de la développeuse
- Le filtre sera utilisé conjointement avec une ampoule dépolie de 15 watt

Traitement

- Le film CP-BU NEW est conçu pour le traitement RP, le traitement lent et le traitement manuel
- Les bains révélateurs et fixateurs Agfa sont recommandés

Manipulation

- Le film doit être manipulé avec précaution
- Veillez à éviter de le froisser, de le tordre, de le soumettre à une pression

Conservation

- Les films non exposés et non déballés seront conservés à une température entre 4 et 25 °C dans un endroit sec
- Le film sera en outre préservé des radiations ionisantes


Conditionnement

- Le film CP-BU NEW est disponible dans tous les formats habituels en boîte de 100
- D'autres conditionnements et formats peuvent être obtenus sur commande expresse

COURBES


Courbe sensitométrique

- Révélateur conditionné de première classe dans un système RP

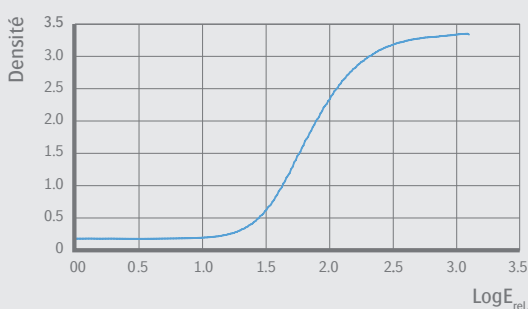

Courbe sensibilité spectrale

- Sensibilité en fonction de l'énergie nécessaire pour obtenir une densité supérieure à 1 au-dessus du niveau de voile

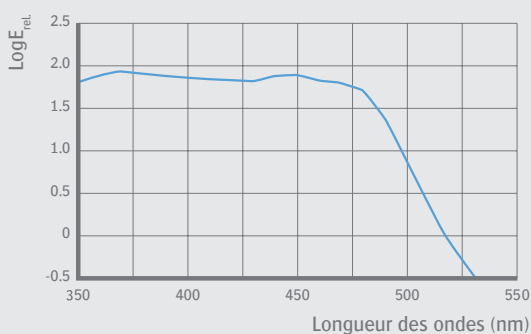

Le symbole utilisé sur l'étiquette de l'emballage signifie : Ouvrir uniquement dans la chambre noire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant Agfa local.

CP-BU NEW

Pour plus d'informations concernant Agfa, veuillez consulter notre site Web sur www.agfa.com ■

Agfa et le losange Agfa sont des marques d'Agfa-Gevaert NV, Belgique, ou de ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les informations reprises ici ont uniquement un but informatif, les caractéristiques des produits et services présentés dans cette publication peuvent changer à tout moment sans préavis. Il se peut que certains produits ou services ne soient pas disponibles dans votre région. Pour des informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre délégué commercial local. Agfa-Gevaert NV s'efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© 2019 Agfa NV
Tous droits réservés
Edité par Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Belgique

5RQZH FR 00201902

AGFA 