



Kaip dezinfekuoti kasetes

Kasetėms dezinfekuoti naudokite tik „Agfa“ patvirtintas dezinfekavimo priemones (Žr. patvirtintų dezinfekavimo priemonių sąrašą). Jeigu planuojate naudoti kitas dezinfekavimo priemones, prieš naudojimą reikia gauti „Agfa“ patvirtinimą, nes dauguma dezinfekavimo priemonių gali pažeisti kasetę. UV dezinfekuoti irgi draudžiama.

Išsamiai apie tai, kaip dezinfekuoti, ieškokite naudojimo instrukcijose, gautose kartu su dezinfekavimo priemone.

Dezinfekcijos saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS:

Prieš dezinfekuojuant kasetę, išimkite vaizdo plokštę ir pasirūpinkite, kad kasetė būtų švari.

Jei reikia, galite nuvalyti kasetes iš išorės, naudodami tik drėgną šluostę (vandeniu, muilu).



ĮSPĖJIMAS:

Ant kasetės paviršiaus negalima naudoti „AGFA CR Phosphor Plate Cleaner“, PROSAT šluosčių, AGFA CURIX ekrano valiklio, ar jokių kitų ekrano valiklių ar skysčių, kurių sudėtyje yra alkoholio, nes tai gali pakenkti kasetei.



ĮSPĖJIMAS:

Niekuomet nepilkite ir nepurškite skysčių tiesiai ant kasetės paviršiaus, visuomet naudokite tirpale suvilgytą (nevarvantį), nesipūkuojantį audeklą.



ĮSPĖJIMAS:

Naudoti gerai vėdinamose vietose.



ĮSPĖJIMAS:

Dezinfekavimo tirpalas (šluostės) gali sudirginti akis ir odą. Po naudojimo, nusiplaukite rankas vandeniu su

muilu. Prieš naudodamiesi, peržiūrėkite papildomą informaciją gamintojo medžiagos saugos duomenų lape (SDL) ir rekomendacijas gaminio etiketėje.



ĮSPĖJIMAS:

Pasirūpinkite, kad prieš transportavimą kasetė būtų tinkamai nukenksmintą ir dezinfekuota.



Prieš rengdamiesi grąžinti kasetę naudojimui, įsitikinkite, ar visi paviršiai išdžiuvę.



Laikykitės su valymo / dezinfekavimo gaminiu pateiktų naudojimo instrukcijų.

Patvirtintos dezinfekavimo priemonės

Šios dezinfekavimo priemonės nustatytos tinkamomis kasetės medžiagai ir gali būti naudojamos ant išorinio kasetės paviršiaus.

Organinių rūgščių dezinfekavimo priemonė:

- „multiGREEN® Surface Disinfection.MED“ (šluostės arba purškiklis) („multiGREEN®“ yra „ulti med Products (Vokietija) GmbH“ prekės ženklas)

Kvartero amonio druskos dezinfekavimo priemonė:

- „mikrozid®“ švelnios šluostės („mikrozid“ yra „Schülke&Mayr GmbH“ prekės ženklas)
- „Sani-Cloth®“ aktyvios vienkartinės šluostės („Sani-Cloth“ yra PDI® prekės ženklas)



DĖMESIO:

Dažnas kvartero amonio druskos dezinfekavimo priemonės naudojimas gali sugadinti kasetės dalis. Todėl venkite dažno naudojimo, per visą kasetės naudojimo laiką rekomenduojama naudoti ne daugiau kaip 50 kartų.

Kaip naudoti apsauginį plastmasinį voką

Jeigu kasetė naudojama aplinkoje, kur reikalinga dezinfekcija arba kurioje gali patekti kraujo ar kitų kūno skysčių, naudokite plastmasinius vokus, kad apsaugotumėte kasetę nuo tiesioginio kontakto su pacientu. Pasirūpinkite, kad plastikinis vokas nebūtų susiraukšlėjęs, nes antraip vaizde matysis raukšlės.

Atsakomybė

Vartotojas pats atsako už tinkamos dezinfekavimo procedūros bei tvarkos parinkimą ir aprašymą.