



# Dezinfekcia kaziet

Na dezinfekciu kaziet používajte len dezinfekčné prostriedky schválené spoločnosťou Agfa (pozri zoznam schválených dezinfekčných prostriedkov). Ak plánujete použiť iné dezinfekčné prostriedky, pred ich použitím je potrebné schválenie spoločnosťou Agfa, pretože väčšina dezinfekčných prostriedkov môže poškodiť kazetu. Rovnako nie je dovolená dezinfekcia UV žiarením.

Podrobné informácie o spôsobe aplikovania dezinfekcie nájdete v pokynoch na použitie dodaných s dezinfekčným prostriedkom.

## Bezpečnostné pokyny pre dezinfekciu

---



**VAROVANIE:**

**Pred dezinfikovaním kazety vyberte platňu a uistite sa, či je kazeta čistá.**

**V prípade potreby môžete vyčistiť vonkajšiu stranu kaziet, len vlhkou handričkou (voda, mydlo).**



**VAROVANIE:**

**Na čistenie povrchu kazety nepoužívajte prostriedok AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, utierky PROSAT, prostriedok na čistenie obrazoviek AGFA CURIX ani žiadne iné prostriedky na čistenie obrazoviek či kvapaliny obsahujúce alkohol, pretože môžu kazetu poškodiť.**



**VAROVANIE:**

**Nikdy nelejte ani nestriekajte kvapaliny priamo na povrch kazety, vždy používajte handričku nepúšťajúcu vlákna, navlhčenú (nie namočenú) v roztoku.**



**VAROVANIE:**

**Používajte na dobre vetraných miestach.**

**VAROVANIE:**

**Dezinfekčné roztoky/utierky môžu spôsobiť podráždenie očí alebo kože. Po použití si umyte ruky mydlom a vodou. Pred použitím si pozrite ďalšie informácie v karte bezpečnostných údajov výrobcu a odporúčaniach na výrobnom štítku.**

**VAROVANIE:**

**Kazetu pred odoslaním náležite dekontaminujte a dezinfikujte.**



Pred opätovným použitím kazety sa uistite, či sú všetky povrchy dôkladne suché.



Postupujte podľa pokynov na používanie poskytnutých s produktom na čistenie/dezinfekciu.

## Schválené dezinfekčné prostriedky

---

S materiálom kazety sú kompatibilné nasledujúce dezinfekčné prostriedky, ktoré sa môžu použiť na vonkajší povrch kazety.

### Dezinfekčný prostriedok na báze organickej kyseliny:

- povrchová dezinfekcia multiGREEN® Surface Disinfection.MED (utierky alebo sprej)  
(multiGREEN® je ochranná známka spoločnosti ulmi med Products (Deutschland) GmbH)

### Dezinfekčný prostriedok na báze kvartérnej amóniovej soli:

- utierky na citlivé povrchy mikroqid®  
(mikroqid je ochranná známka spoločnosti Schülke&Mayr GmbH)
- jednorazové utierky Sani-Cloth® Active  
(Sani-Cloth je ochranná známka spoločnosti PDI®)

**UPOZORNENIE:**

Časté používanie dezinfekčného prostriedku na báze kvartérnej amóniovej soli môže spôsobiť porušenie dielov kazety. Preto sa vyhnite častému používaniu; odporúčame obmedziť použitie na < 50 použití počas životnosti kazety.

## **Použitie ochranného plastového obalu**

---

Ak sa kazeta používa v prostredí, kde sa vyžaduje dezinfekcia alebo kde sa mohla dostať do styku s krvou či inými telesnými tekutinami, použite plastové obaly na ochranu kazety pred priamym kontaktom s pacientom. Plastový obal nesmie byť pokrčený, aby sa na snímke nezobrazovali záhyby.

## **Vymedzenie zodpovednosti**

---

Za výber a opis správneho dezinfekčného postupu a zásad je zodpovedný používateľ.