



A kazetták fertőtlenítése

A kazetták fertőtlenítéséhez kizárólag az Agfa által jóváhagyott fertőtlenítőszerket használjon (lásd a Jóváhagyott fertőtlenítőszer listáját). Ha már fertőtlenítőszer kíván használni, használat előtt be kell kérni az Agfa jóváhagyását, mivel a legtöbb fertőtlenítőszer károsítja a kazettát. Tilos az UV-s fertőtlenítés.

A fertőtlenítés menetének részletes leírását a fertőtlenítőszerhez tartozó tájékoztatóban olvashatja.

A fertőtlenítésre vonatkozó biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS:



A kazetta fertőtlenítése előtt távolítsa el a képlemezt, és ügyeljen arra, hogy a kazetta tiszta legyen.

Szükség esetén meg lehet tisztítani a kazetták külső felületét, lehetőleg csak nedves (szappanos vizes) kendővel.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne használjon AGFA CR Phosphor Plate Cleaner foszforlemez-tisztítót, PROSAT törőlkendőket, AGFA CURIX képernyő-tisztítót és folyadékot tartalmazó alkoholokat a kazetta felületén, mivel ez a kazetta sérüléséhez vezethet.



FIGYELMEZTETÉS:

Tilos folyadékot közvetlenül a kazetta felületére önteni vagy permetezni – mindig használjon tiszta, az oldattal nedvesített (de nem csöpögő), pihementes törőlkendőt.



FIGYELMEZTETÉS:

Csak jól szellőző helyen használható!

**FIGYELMEZTETÉS:**

A fertőtlenítő oldat, illetve a törőlkendő szem- és bőrirritációt okozhat. Használat után szappanos vízzel mosson kezét. Használat előtt olvassa el a gyártó anyagbiztonsági (MSDS) adatlapját és a címkén szereplő ajánlásait, ahol további információkat találhat.

**FIGYELMEZTETÉS:**

Ügyeljen arra, hogy a kazetta szállítás előtt teljesen szennyezésmentesített és fertőtlenített legyen.



A kazettát újbóli felhasználása előtt győződjön meg arról, hogy minden felület teljesen száraz legyen.



Kövesse a használati utasítás előírásait a termék tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozóan.

Jóváhagyott fertőtlenítőszer

Az alábbi fertőtlenítőszeret találtuk kompatibilisnek a kazetta anyagával; ezeket lehet használni a kazetta külső felületén:

Szerves sav alapú fertőtlenítőszer:

- A multiGREEN® Surface Disinfection.MED (törőlkendő vagy spray)
(A multiGREEN® az ulti med Products (Deutschland) GmbH védjegye)

Kvaterner ammóniumsó alapú fertőtlenítőszer:

- mikroizid szenzitív törőlkendő
(A mikroizid a Schölke&Mayr GmbH védjegye)
- Sani-Cloth® Active eldobható törőlkendő
(A Sani-Cloth a PDI® védjegye)

**VIGYÁZAT:**

A kvaterner ammóniumsó alapú fertőtlenítőszer gyakori használata a kazetta részeinek törését eredményezheti. Ezért kerülje a gyakori használatot; javasoljuk a kazetta élettartama alatt kevesebb mint 50 alkalommal történő alkalmazást.

A műanyag védőtok használata

Ha a kazettát olyan környezetben használja, ahol fertőtlenítés szükséges, vagy ahol vérrel vagy más testnedvekkel érintkezhet, a kazettát műanyag tasakokkal védje a pácienssel való érintkezéstől. Ügyeljen arra, hogy a műanyag tasak ne gyűrődjön, hogy a képen ne jelenjenek meg repedések.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A megfelelő fertőtlenítő eljárás és irányelv kiválasztása és leírása a felhasználó feladata.