



為片匣消毒

若為片匣消毒，請僅使用 Agfa 核准的消毒劑（請參閱核准的消毒劑清單）。如果您打算使用其他消毒劑，則使用前需要 Agfa 的核准，因為大多數消毒劑都可能會損壞片匣。也不可使用紫外線消毒。

如需有關如何進行消毒的詳細資訊，請參閱消毒劑隨附的使用指示說明。

消毒的安全指示

WARNING（警告）：



消毒片匣之前，請先將 IP 板拆除並確保片匣乾淨。

必要時，您可以清潔片匣的外部，最好只使用濕布（水、肥皂）。



WARNING（警告）：

請勿對片匣表面使用 AGFA CR 螢光板清潔劑、PROSAT wipes、AGFA CURIX 螢幕清潔劑或其他任何的螢幕清潔劑，或任何包含酒精的液體，因為這會導致片匣損壞。



WARNING（警告）：

請勿直接將液體倒入或噴灑在片匣表面，請始終使用沾有溶劑（不要濕透）之乾淨不起棉絮的布。



WARNING（警告）：

在通風良好的地方使用。



WARNING (警告) :

消毒溶劑/擦拭布可能會刺激眼睛與皮膚。使用之後請用肥皂和水洗手。使用之前如需其他資訊，請參閱製造商的「材料安全資料表」(MSDS) 與產品標籤上的建議。



WARNING (警告) :

請確保裝運之前已將片匣正確地淨化與消毒。



請確保在將片匣放回使用之前，所有表面都已徹底擦乾。



請遵照清潔 / 消毒產品隨附的使用說明。

核准的消毒劑

已發現下列消毒劑與片匣材料相容，且可用在片匣的外表面上。

有機酸基消毒劑：

- multiGREEN® 表面消毒產品（擦拭布或噴霧）（multiGREEN® 是 ulimed Products (Deutschland) GmbH 的商標）

四級銨鹽基消毒劑：

- mikrozid® 敏感擦拭布
（mikrozid 是 Schülke&Mayr GmbH 的商標）
- Sani-Cloth® Active 一次性使用擦拭布
（Sani-Cloth 是 PDI® 的商標）



注意：

頻繁使用四級銨鹽基消毒劑會導致片匣零件破損。因此，為避免頻繁使用，建議在片匣使用壽命內限制使用次數為 <50 次。

保護塑膠封套的使用

如果片匣用於需要消毒的環境，或可能沾染到血液或其他體液的地方，請使用塑膠封套保護片匣，以避免患者直接接觸片匣。請確定塑膠封套並未起皺，以避免摺痕顯示在影像中。

免責聲明

選擇與說明適當的消毒程序及原則是使用者的責任。