



Desinfisere kassetter

Til desinfeksjon av kassetten må det kun brukes desinfeksjonsmidler som er godkjent av Agfa (se liste over godkjente desinfeksjonsmidler). Hvis du planlegger å bruke andre desinfeksjonsmidler, må disse godkjennes av Agfa før bruk da de fleste desinfeksjonsmidler kan skade kassetten. Desinfeksjon med UV-stråling er heller ikke tillatt.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du desinfiserer, kan du se bruksanvisningen som følger med desinfeksjonsmiddelet.

Sikkerhetsanvisninger for desinfeksjon



ADVARSEL:

Før kassetten desinfiseres må du ta ut bildeplaten og forsikre deg om at kassetten er ren.

Når det er nødvendig kan du rengjøre utsiden av -kassetten, fortrinnsvis bare med en fuktet klut (vann, såpe).



ADVARSEL:

Ikke bruk AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, PROSAT-kluter, AGFA CURIX Screen Cleaner eller andre skjermrensere eller alkoholholdige væsker på kassettoverflaten, da dette kan føre til skade på kassetten.



ADVARSEL:

Hell eller spray ikke væske direkte på kassettenes overflate, og bruk alltid en ren klut fuktet med løsningen (som ikke drypper) og som avgir lite lo.



ADVARSEL:

Må brukes i godt ventilerte områder.



ADVARSEL:

Desinfeksjonsløsninger/-kluter kan irritere øyne og hud. Vask hendene med såpe og vann etter bruk. Se produsentens

sikkerhetsdatablader (MSDS) og anbefalingene på produktetiketten for å få mer informasjon før bruk.



ADVARSEL:

Kontroller at kassetten er skikkelig dekontaminert og desinfisert før den sendes.



Pass på at alle overflater er helt tørre før du tar kassetten i bruk igjen.



Følg instruksjonene for bruk som angitt med rengjørings-/desinfeksjonsmiddelet.

Godkjente desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmidlene nedenfor er funnet kompatible med kassettmaterialet og kan brukes på den utvendige overflaten til kassetten.

Desinfeksjonsmiddel basert på organiske syrer:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (tørk eller spray)
(multiGREEN® er et varemerke fra ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfeksjonsmiddel basert på kvartært ammoniumsalt:

- mikrozyd® sensitive engangskluter
(mikrozyd er et varemerke for Schülke&Mayr GmbH)
- Sani-Cloth® Active engangskluter
(Sani-Cloth er et varemerke fra PDI®)



FORSIKTIG:

Hyppig bruk av desinfeksjon med kvaternært ammoniumsalt kan føre til brudd i kassettdelene. Unngå derfor hyppig bruk. Det anbefales å begrense bruket til < 50 ganger i løpet av kassettenes levetid.

Bruk av beskyttende plastkonvolutt

Hvis kassetten brukes i et miljø der det kreves desinfisering eller den kan komme i kontakt med blod eller andre kroppsvæsker, må det brukes plastkonvolutter til å beskytte kassetten mot direkte kontakt med pasienten. Pass på at plastkonvoluttene ligger plant uten krøller slik at du unngår at disse vises på bildet.

Ansvarsfraskrivelse

Valg og beskrivelse av egnet desinfeksjonsprosedyre og -policy er brukerens ansvar.