



Desinfección de los chasis

Use solo los desinfectantes aprobados por Agfa para desinfectar los chasis (ver lista de Desinfectantes aprobados). Si tiene previsto usar otros desinfectantes, necesitará la aprobación de Agfa antes de usarlos, puesto que la mayoría de los desinfectantes pueden dañar el chasis. Tampoco está permitido realizar una desinfección con UV.

Si desea información detallada sobre cómo efectuar la desinfección, consulte las instrucciones de uso que vienen con el desinfectante.

Instrucciones de seguridad para la desinfección

ADVERTENCIA:

Antes de desinfectar el chasis, retire la placa de imagen y compruebe que el chasis está limpio.



Cuando sea necesario, puede limpiar la parte externa de los chasis, preferentemente solo con un paño húmedo (agua o jabón).



ADVERTENCIA:

No use el producto AGFA CR Phosphor Plate Cleaner, los paños de limpieza PROSAT, el limpiador de pantallas CURIX de AGFA ni ningún otro limpiador de pantallas o líquido que contenga alcohol para limpiar la superficie del chasis, ya que puede dañar el chasis.



ADVERTENCIA:

Nunca vierta ni rocíe líquidos directamente sobre la superficie del chasis, use siempre un paño limpio (que suelte poca o ninguna pelusa) humedecido con la solución, sin que llegue a gotear.



ADVERTENCIA:

Utilizar en áreas bien ventiladas.



ADVERTENCIA:

La solución desinfectante o los paños de limpieza desinfectantes pueden causar irritación en los ojos y la piel. Lávese las manos con agua y jabón después de usar esos productos. Además, antes de usarlos, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales del respectivo fabricante donde encontrará más información, así como las recomendaciones que vienen en la etiqueta del producto.



ADVERTENCIA:

Antes de enviarlo, compruebe que el chasis ha sido correctamente descontaminado y desinfectado.



Compruebe que todas las superficies están totalmente secas antes de devolver los chasis y seguir usándolos.



Siga las instrucciones de uso que se proporcionan con el producto de limpieza o desinfección.

Desinfectantes aprobados

Se ha determinado que los siguientes desinfectantes son compatibles con el material del chasis y pueden aplicarse sobre la superficie exterior del chasis:

Desinfectar productos a base de ácidos orgánicos:

- multiGREEN® Surface Disinfection.MED (paños o spray)
(multiGREEN® es una marca registrada de ulti med Products (Deutschland) GmbH)

Desinfectar productos a base de sal de amonio cuaternario:

- paños para superficies sensibles mikrozid®
(mikrozid es una marca comercial de Schülke&Mayr GmbH)
- Paños desechables Sani-Cloth® Active
(Sani-Cloth es una marca registrada de PDI®)

**ATENCIÓN:**

El uso frecuente del desinfectante a base de sal de amonio cuaternario puede causar roturas de piezas del chasis. Por lo tanto, debe evitar el uso frecuente, y se recomienda limitar el uso a menos de 50 veces durante la vida útil del chasis.

Uso de un envoltorio protector de plástico

Si el chasis se utiliza en un entorno que exige desinfección o en el que puede producirse un contacto con la sangre u otros fluidos corporales, utilice envoltorios de plástico para proteger el chasis y evitar que entre directamente en contacto con el paciente. Asegúrese de que en el envoltorio de plástico no haya arrugas para evitar que éstas se reflejen en la imagen.

Exención de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario seleccionar y describir la normativa y el procedimiento de desinfección adecuado.