

CR MD4.0:n ja CR MM3.0:n kuvalevyn puhdistaminen

Sisältö

Kuvalevyn puhdistaminen	3
Milloin kuvalevy on puhdistettava?	4
Sallitut puhdistustuotteet?	5
Miten kuvalevy on puhdistettava?	6

Kuvalevyn puhdistaminen



Kommentti: Varmista puhdistessa CR-levyä, että laitat sen takaisin samaan kasettiin. Uusien alustuskoodien käyttöönoton vuoksi on tärkeää, että CR-levy ei joudu kasettiin, joka on alustettu toisella koodilla. Jos et ole varma, alusta kasetti uudelleen käyttämällä CR-levyyn merkittyä alustuskoodia.

Aiheet:

- [Milloin kuvalevy on puhdistettava?](#)
- [Sallitut puhdistustuotteet?](#)
- [Miten kuvalevy on puhdistettava?](#)

Milloin kuvalevy on puhdistettava?

- Vähintään kerran kuukaudessa tai aina, kun on syytä epäillä hiukkasten näkyvän röntgenkuvissa.
- CR Mammo -levyt vaativat usein toistuvaa puhdistusta: 200 jakson jälkeen mutta joka tapauksessa vähintään kerran viikossa.
- Myös erittäin pölyisissä tai kuivissa oloissa puhdistus on suoritettava useammin. (Puhdistusaine sisältää antistaattista ainetta, joka vähentää staattisen sähkön ja pölyn kertymistä.)

Sallitut puhdistustuotteet?

- CR MD4.0 -kuvalevyille käytä vain AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta sekä nukkaamatonta selluloosaliinaa levyn puhdistamiseen.
- CR MM3.0 -kuvalevyille käytä vain AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja Polynit-pyyhkeitä levyn puhdistamiseen.



Varoitus: AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusaineen ja Polynit-pyyhkeiden käyttö CR MM3.0 -levyyn on rajoitettu kuvalevyihin, joiden eränumero alkaa "C":llä tai sitä suuremmalla kirjaimella. CR MM3.0 -kuvalevyille, joiden eräkoodi alkaa kirjaimella "B" tai numerolla, käytä levyn puhdistamiseen ainoastaan Agfalta tai Agfan sertifioidulta jälleenmyyjältä ostettuja erityismammografia-PROSAT-pyyhkeitä.




Kommentti: Vaihtelevissa olosuhteissa, joissa käytetään vanhoja ja uusia CR MM3.0 -levyjä, suositellaan levyn puhdistamista ainoastaan Agfalta tai Agfan sertifioidulta jälleenmyyjältä ostettuja PROSAT-pyyhkeitä.

Miten kuvalevy on puhdistettava?

Kuvalevyn puhdistaminen:

1. Ota sopiva pyyhe tai kostuta liina puhdistusaineella ja pyyhi levyn pinta keveästi ja tasaisesti (fosforisivu ja takasivu).

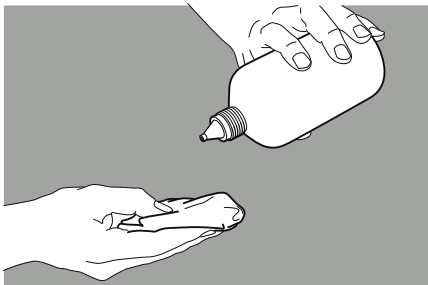

2. Anna levyn pinnan kuivua noin 10 minuuttia, jotta liuottimet haihtuvat.
Puhdistettuasi CR MM3.0 -kuvalevyn anna sen pinnan kuivua noin yhden (1) minuutin ajan, ennen kuin asetat sen takaisin kasettiin.
3. Kun levyn pinta on kuiva (noin 10 minuutin jälkeen), tarkista uudelleen, että siinä ei ole hiukkasia tai muita epäpuhtauksia, ennen kuin laitat levyn kasettiin.



Kommentti: PROSAT-pyyhkeitä voidaan käyttää vain kerran, mutta eri kuvalevyjä voidaan puhdistaa useampia peräkkäin samalla pyyhkeellä.



Kommentti: Säilytys: sulje PROSAT-pyyhepakkaus huolellisesti. Agfa suosittelee, että pyyhkeitä säilytetään viileässä, jotta ne puhdistavat mahdollisimman tehokkaasti. Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.