

清洁 CR MD4.0 和 CR MM3.0 的 IP 板

内容

清洁 IP 板	3
何时需清洁 IP 板?	4
允许使用哪些清洁产品?	4
如何清洁 IP 板?	5

清洁 IP 板



注意: 在清洁时, 请确保始终将 CR IP 板放入同一个暗盒中。随着新初始化代码的引入, CR IP 板不能在使用另一代码初始化的暗盒中结束, 这一点非常重要。如有任何问题, 可以使用 CR IP 板上的初始化代码重新初始化暗盒。

主题:

- [何时需清洁 IP 板?](#)
- [允许使用哪些清洁产品?](#)
- [如何清洁 IP 板?](#)

何时需清洁 IP 板？

- 至少每月一次或无论何时 X 光图像上有可见可疑物质颗粒时。
- CR Mammo IP 板的必要清洁频率：每周至少一次或者每 200 次循环后一次（以先满足的条件为准）。
- 在灰尘较多或非常干燥的条件下也需频繁清洁。（屏幕清洁剂内包含抗静电剂，它可以减少静电电荷的积聚和尘埃聚集。）

允许使用哪些清洁产品？

- 对于 CR MD4.0 IP 板，仅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和柔软不起毛的纤维布来清洁 IP 板。
- 对于 CR MM3.0 IP 板，仅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布来清洁 IP 板。



警告: 对于 CR MM3.0, AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布仅用于清洁批号以字母“C”或更高字母开头的 IP 板。对于批号以字母“B”或数字开头的 CR MM3.0 IP 板,只能使用从 Agfa 或由 Agfa 认证的经销商处购买的乳房造影专用的 PROSAT 擦拭布来清洁 IP 板。




注意: 在新旧 CR MM3.0 板混合使用的环境中, 建议仅使用从 Agfa 或由 Agfa 认证的经销商处购买的 PROSAT 擦拭布来清洁 IP 板。

如何清洁 IP 板？

要清洁 IP 板：

1. 采用适当的擦拭布或用清洁剂沾湿布后，轻柔均匀地擦洗 IP 板表面（磷侧和后侧）。

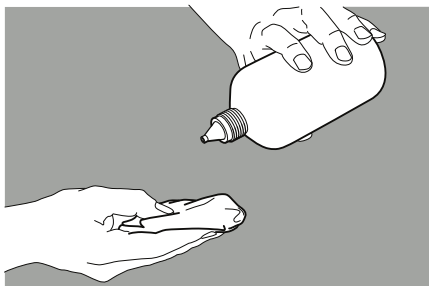

2. 将 IP 板表面晾干约 10 分钟以待溶剂完全蒸发。

清洁 CR MM3.0 IP 板时，在将 IP 板放回到暗盒之前，请将 IP 板表面干燥约一 (1) 分钟。

3. 一旦 IP 板表面已干燥（约 10 分钟后），请再次检查有无物质颗粒和其它杂质后将 IP 板放入暗盒。



注意：这些 PROSAT 擦拭布仅能使用一次，但是可使用一个擦拭布连续清洁不同的 IP 板。



注意：存储条件：小心密封 PROSAT 擦拭布袋。Agfa 建议将擦拭布冷藏保存，以使其有效性达到最大程度。请留意包装上的说明。