

清潔 CR MD4.0 與 CR MM3.0 的 IP 板

內容

清潔 IP 板	3
何時清潔 IP 板?	4
可用的清潔產品為何?	4
如何清潔 IP 板?	5

清潔 IP 板



注意: 清潔時, 請務必確認 CR IP 板是被送入同一個片匣。一旦採用新的初始化代碼後, 即不得將 CR IP 板送入初始化成其他代碼的片匣中。如有疑慮, 應使用 CR IP 板上的初始化代碼重新初始化片匣。

主題:

- [何時清潔 IP 板?](#)
- [可用的清潔產品為何?](#)
- [如何清潔 IP 板?](#)

何時清潔 IP 板？

- 至少每個月清潔一次，或在 X 光影像上看見可疑粒子時清潔。
- CR Mammo IP 板需要經常清潔：至少一週一次，或每使用 200 次之後清潔一次（以先達到者為準）。
- 如果環境的灰塵太多或太乾燥，亦必須時常清潔。（螢幕清潔劑含有抗靜電劑，可減少靜電荷積聚，使灰塵不易沾附。）

可用的清潔產品為何？

- 針對 CR MD4.0 IP 板，請僅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和不含毛絮的軟布來清潔 IP 板。
- 針對 CR MM3.0 IP 板，請僅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布來清潔 IP 板。



警告: 針對 CR MM3.0，請僅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布來清潔批號以字母 "C" 或更高字母開頭的 IP 板。針對批號以字母 "B" 或數字開頭的 CR MM3.0 IP 板，請僅使用從 Agfa 或 Agfa 認證經銷商購買的專用乳腺 X 光攝影 PROSAT 擦拭布來清潔 IP 板。




注意: 在新舊 CR MM3.0 IP 板的混合環境中，建議您僅使用從 Agfa 或 Agfa 認證經銷商購買的 PROSAT 擦拭布來清潔 IP 板。

如何清潔 IP 板？

要清潔 IP 板：

1. 使用適當的擦拭布或用清潔劑沾濕擦布，輕柔並均勻擦拭 IP 板的表面（含磷面和背面）。

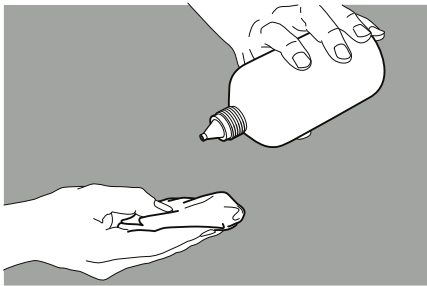

2. 靜待 10 分鐘等 IP 板表面風乾，讓溶液完全揮發掉。

清潔 CR MM3.0 IP 板時，請先將板表面晾乾約一 (1) 分鐘的時間，然後再將板放回到片匣中。

3. 等到 IP 板表面乾燥後（約 10 分鐘），將它放入片匣前請再檢查是否還留有物質粒子或其他雜質。



注意: PROSAT 擦拭布只能使用一次，但您可以用一塊擦拭布逐一擦拭不同的 IP 板。



注意: 存放: 請小心封好 PROSAT 擦拭布的袋子。Agfa 建議您將擦拭布放在陰涼處，以最大程度發揮其效用。請考量包裝相關指示。