

清洁 CR HD5.0、CR MD4.0R、 CR HM5.0 和 CR MM3.0R 的 IP 板

清洁 IP 板



警告: 注意: CR HD5.x 和 CR HM5.x 探测器的 IP 板非常昂贵, 在处理时应格外小心!



警告: 请勿将 IP 板的磷光体侧朝下放置!



警告: 为避免变形, 请将 IP 板总是水平置于平坦表面上

主题:

- [何时需清洁 IP 板?](#)
- [允许使用哪些清洁产品?](#)
- [如何清洁 IP 板?](#)

何时需清洁 IP 板?

CR 探测器的内层由条状衬垫构成。这样可有效地防止 IP 板上静电充电和尘埃聚集。不过, 建议使用以下方法每季度清洁一次 CR HD5.x 探测器的 IP 板及 CR MD4.xR 的 IP 板与暗盒。

CR MM3.xR IP 板和 CR Hm5.x Mammo 探测器 IP 板需要更频繁地清洁: 至少每周一次或每 200 次循环后一次 (以先到者为准)。

允许使用哪些清洁产品?

- 对于 CR MD4.xR 和 CR HD5.x, 仅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和柔软不起毛的纤维布或 Polynit 擦拭布来清洁 IP 板。
- 对于 CR MM3.xR 和 CR HM5.x, 仅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布来清洁 IP 板。



警告: 对于 CR MM3.xR, Agfa CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布仅用于清洁批号以字母“C”或更高字母开头的 IP 板。对于批号以字母“B”开头的 CR MM3.xR IP 板, 仅使用从

Agfa 或由 Agfa 认证的经销商处购买的乳房造影专用的 PROSAT 擦拭布来清洁 IP 板。




注意: 在新旧 CR MM3.xR 板混合使用的环境中, 建议仅使用从 Agfa 或由 Agfa 认证的经销商处购买的 PROSAT 擦拭布来清洁 IP 板。


如何清洁 IP 板?

要清洁 IP 板:

1. 将钥匙或笔插到暗盒锁内, 打开蒙板。

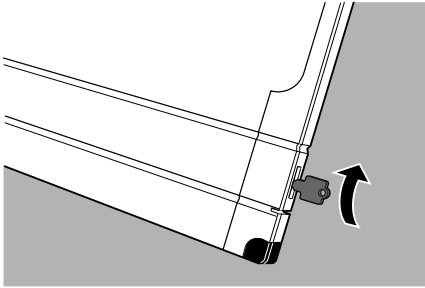


2. 移除钥匙或笔。
3. 翻转暗盒, 使黑色管侧向上。
4. 用两个拇指按住蒙板, 小心地将 IP 板滑出到桌面上。

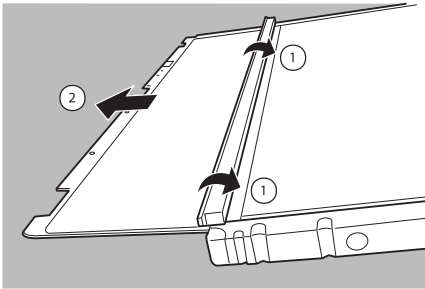


5. 如下图所示, 将 IP 板放到空暗盒的黑色管侧。

将 IP 板放在暗盒上, 使钩子挂在暗盒的边缘, 这样可避免 IP 板发生弯曲。

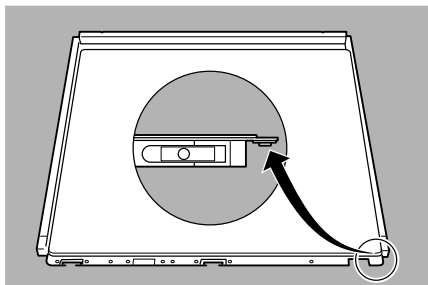

6. 按如下方法清洁 IP 板：

- 采用适当的擦拭布或用清洁剂沾湿布，轻柔均匀地擦拭 IP 板表面。

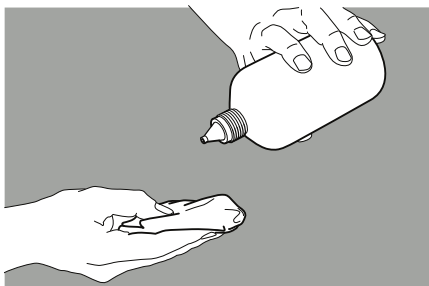


警告：如果使用 CR Phosphor Plate Cleaner，切勿将其直接泼溅于 IP 板上。

- 将 IP 板表面晾干约 10 分钟以待溶剂完全蒸发。
- 一旦 IP 板表面已干燥（约 10 分钟后），请再次检查有无物质颗粒和其它杂质后将 IP 板放入暗盒。

7. 将 IP 板放回到暗盒中。

核查白色磷光体侧是否定位到暗盒的黑色管侧，并确认蒙板未刮伤 IP 板。

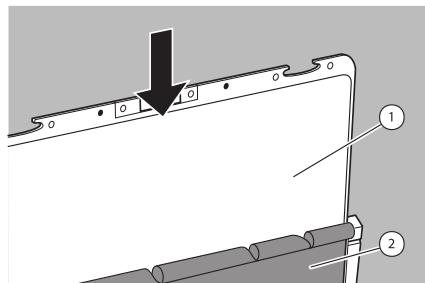

1. 白色磷光体侧
2. 暗盒的黑色管侧




警告: 确保小心地将 IP 板滑入。请勿使 IP 板垂直跌落到暗盒中！这会对磷光体造成损坏。

8. 将 IP 板完全放入暗盒后，关闭蒙板。

要轻松地关闭蒙板，请在关闭蒙板时将钥匙或笔插到暗盒锁内。关闭蒙板后，移除钥匙或笔。



注意: 确保将正确的 IP 板放回到正确的暗盒中。IP 板上的标签必须与暗盒上的标签相符。

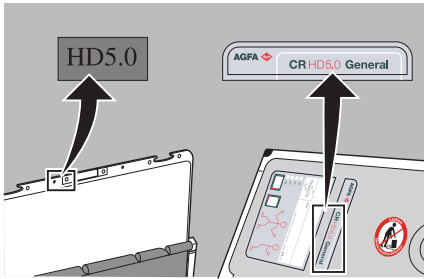

注意: 清洁完成后，必须在使用前删除 IP 板。