

**CR HD5.0:n, CR MD4.0R:n, CR
HM5.0:n ja CR MM3.0R:n
kuvalevyn puhdistaminen**

Kuvalevyn puhdistaminen



Varoitus: Huomaa, että CR HD5.x- ja CR HM5.x -ilmaisimien kuvalevy on erittäin kallis osa, jota käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta!



Varoitus: Älä aseta kuvalevyä fosforipuoli alaspäin!



Varoitus: Jotta levyt eivät pääsisi taipumaan tai vääristymään, säilytä ne aina vaakasuorassa tasaisella pinnalla.

Aiheet:

- [*Milloin kuvalevy on puhdistettava?*](#)
- [*Hyväksytyt puhdistustuotteet*](#)
- [*Miten kuvalevy puhdistetaan?*](#)

Milloin kuvalevy on puhdistettava?

CR-ilmaisimen sisäverhous on fleeceä. Tämä varmistaa hyvän suojan sähköstaattisia varauksia vastaan ja ehkäisee tehokkaasti pölyn kertymistä kuvalevyille. Suosittelemme tästä huolimatta, että CR HD5.x -ilmaisimien kuvalevyt ja CR MD 4.xR -levyt ja -kasetit puhdistetaan neljännesvuosittain alla kuvatulla tavalla.

CR MM3.xR -kuvalevy ja CR HM5.x Mammo -ilmaisimen kuvalevy tulee puhdistaa useammin: vähintään kerran viikossa tai 200 jakson välein.

Hyväksytyt puhdistustuotteet

- Käytä CR MD4.xR- ja CR HD5.x-kuvalevyjen puhdistamiseen ainoastaan AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja pehmeää nukkaamatonta selluloosaliinaa tai Polynit-pyyhkeitä.
- Käytä CR MM3.xR- ja CR HM5.x -kuvalevyjen puhdistamiseen ainoastaan AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja Polynit-pyyhkeitä.



Varoitus: Agfa CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja Polynit-pyyhkeitä tulee käyttää ainoastaan CR MM3.xR -levyille, joiden eränumero alkaa "C":llä tai sitä suuremmalla kirjaimella. Käytä CR MM3.xR -kuvalevyjen, joiden eräkoodi alkaa kirjaimella "B", puhdistamiseen ainoastaan Agfalta tai Afgan sertifioidulta jälleenmyyjältä ostettuja erityismammografia-PROSAT-pyyhkeitä.




Kommentti: Jos toimipaikassa käytetään samanaikaisesti sekä vanhoja että uusia CR MM3.xR -kuvalevyjä, suosittelemme, että levyjen puhdistamiseen käytetään ainoastaan Agfalta tai Afgan sertifioidulta jälleenmyyjältä ostettuja PROSAT-pyyhkeitä.


Miten kuvalevy puhdistetaan?

Kuvalevyn puhdistaminen:

1. Avaa suljin työntämällä avain tai kynä kasetin lukkoon.

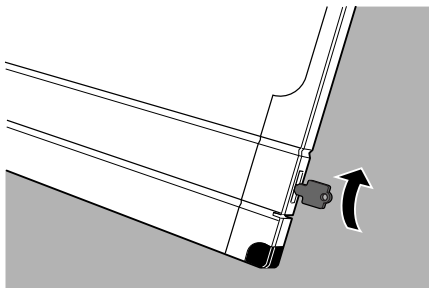


2. Poista avain tai kynä.
3. Käännä kasetti ympäri siten, että musta putkipuoli on ylöspäin.
4. Pidä sulkimesta kiinni kummallakin peukalolla ja anna kuvalevyn liukua varovasti ulos pöydälle.

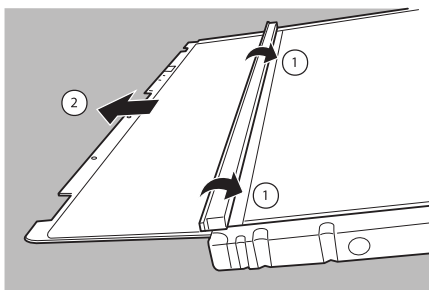


5. Aseta kuvalevy tyhjän kasetin mustan putken puolen päälle alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.

Kuvalevyn taipuminen estetään asettamalla levy kasetin päälle siten, että koukut riippuvat kasetin reunan yli.

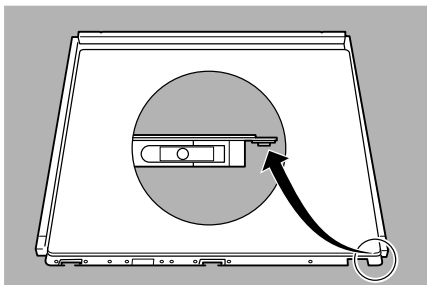

6. Puhdista kuvalevy seuraavasti:

- Käytä sopivaa pyyhettä tai kostuta liina puhdistusaineeseen ja pyyhi **kuvalevyn pinta** pehmein ja tasaisin liikkein.

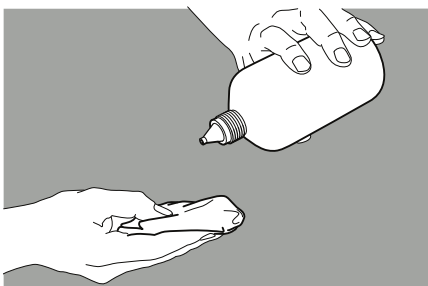


Varoitus: Älä kaada CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta suoraan kuvalevyn päälle.

- Anna **kuvalevyn pinnan** kuivua noin 10 minuuttia, jotta liuottimet haihtuvat.
- Kun kuvalevyn pinta on kuiva (noin 10 minuutin kuluttua), tarkista vielä ennen sen asettamista takaisin kasettiin, ettei siinä ole hiukkasia tai muita epäpuhtauksia.

7. Aseta kuvalevy takaisin kasettiin.

Tarkista, että valkoinen fosforipuoli on kasetin mustaa putkipuolta kohti ja ettei suljin raavi kuvalevyn pintaa.

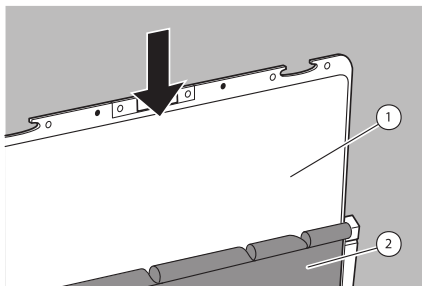

1. Valkoinen fosforipuoli
2. Kasetin musta putken puoli




Varoitus: Liu'uta kuvalevy sisään varovasti. Älä anna levyn pudota kasettiin! Tämä vahingoittaa fosforia.

8. Kun kuvalevy on kokonaan kasetissa, sulje suljin.

Suljin suljetaan helposti työntämällä avain tai kynä kasetin lukkoon, kun suljinta suljetaan. Poista avain tai kynä kun se on kiinni.



Kommentti: Varmista, että oikea kuvalevy tulee oikeaan kasettiin. Kuvalevyn tarran on vastattava kasetin tarraa.

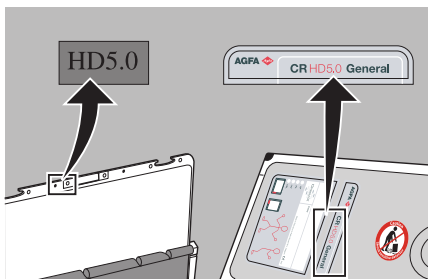

Kommentti: Puhdistamisen jälkeen kuvalevy on pyyhittävä ennen käyttöä.