

# **Rengöring av CR MD4.0T- och CR MM3.0T-bildplattor och -fack**

# Innehåll

Rengöring av fack och bildplatta .....	3
När behöver fack och bildplatta rengöras? .....	4
Vilka rengöringsprodukter kan användas? .....	5
Hur rengörs facket och bildplattan? .....	6

# Rengöring av fack och bildplatta

---



*Obs: Kontrollera att facket och bildplattan alltid sätts in i samma kassett vid rengöring. Det är viktigt att bildplattan inte placeras ihop med ett fack som har initierats för en annan bildplatta.*

## Ämnen:

- *När behöver fack och bildplatta rengöras?*
- *Vilka rengöringsprodukter kan användas?*
- *Hur rengörs facket och bildplattan?*

## **När behöver fack och bildplatta rengöras?**

---

Kassetten innerbeklädnad är tillverkad av teddytyg. Detta ger ett extra starkt skydd mot elektrostatisk uppladdning och dammansamling på bildplattorna. Trots detta rekommenderas att CR MD4.xT-bildplattorna rengörs minst en gång i månaden eller när något som kan vara smuts- eller dammpartiklar syns i röntgenbilderna. De bör rengöras oftare om de används i extra dammig eller mycket torr miljö.

CR MM3.xT-bildplattan måste rengöras oftare: minst en gång per vecka eller efter 200 framkallningscykler (det som inträffar först).

## **Vilka rengöringsprodukter kan användas?**

---


- För rengöring av CR MD4.xT General-bildplattor ska endast rengöringsmedlet AGFA CR Phosphor Plate Cleaner samt en mjuk, luddfri cellulosaduk eller Polynit-torkdukar användas.
- För CR MM3.0T Mammo-bildplattor, använd endast rengöringsmedlet AGFA CR Phosphor Plate Cleaner och Polynit-torkdukar för att rengöra bildplattan.
- Använd endast en torr duk eller blås bort eventuellt damm med komprimerad luft för att rengöra facket.

## Hur rengörs facket och bildplattan?


---

För rengöring av facket och bildplattan:

1. Sätt in en nyckel eller penna i kassettlåset för att öppna slutaren.

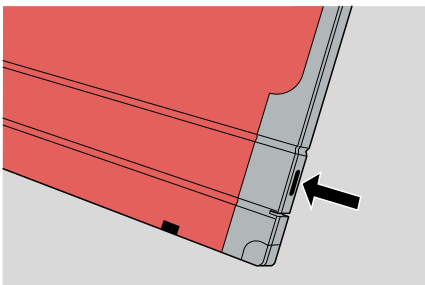


2. Ta bort nyckeln eller pennan.
3. Vänd på kassetten, så att den svarta rörsidan är upptill.
4. Håll fast slutaren med båda tummarna och låt det svarta facket och bildplattan försiktigt glida ut på bordet.

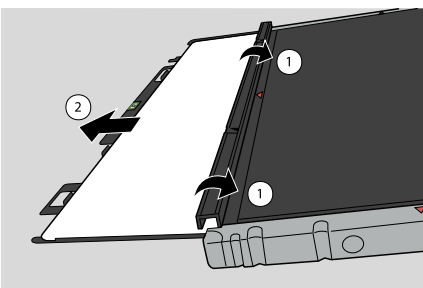

5. Placera det svarta facket med bildplattan på kassetten, som bilden nedan visar.

Facket har två små hakar. Placera facket på kassetten så att hakarna når över kassetten kant. På så sätt undviker du att facket eller bildplattan böjs.

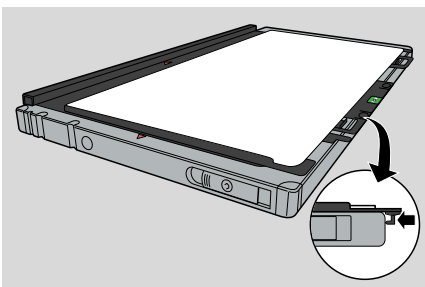


6. Rengör bildplattan och facket så här:

- Ta en lämplig torkduk eller fukta en duk med rengöringsmedel och torka försiktigt av hela **bildplattans yta**.
- Låt **bildplattans yta** torka i cirka 10 minuter så att lösningsmedlet hinner avdunsta.
- Använd endast en torr duk eller blås bort eventuellt damm med komprimerad luft (på burk) för att noga rengöra **facket**. (ANVÄND INTE SKÄRMRENGÖRINGSMEDEL FÖR ATT RENGÖRA FACKET.)
- När bildplattans yta har torkat (efter cirka 10 minuter), kontrollera på nytt att det inte finns dammpartiklar eller smuts innan du placerar facket och bildplattan i kassetten.

7. Lägg tillbaka facket med bildplattan i kassetten.

Kontrollera att den vita fosforsidan är vänd mot kassetten svarta rörsida, och att slutaren inte kommer åt att repa bildplattan.

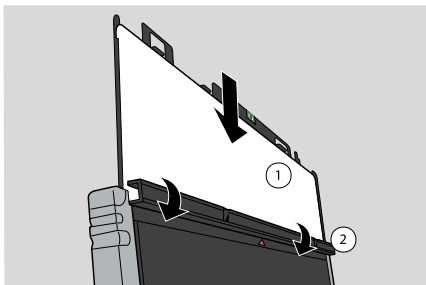


1. Vit fosforsida
2. Kassetten svarta rörsida



**Fara:** Skjut in bildplattan mycket försiktigt. Låt inte plattan falla vertikalt ned i kassetten! Detta skadar fosforskiktet.

8. När det svarta facket med bildplattan är helt inlagt i kassetten stänger du slutaren.

För att förenkla kan du sätta in en nyckel eller penna i kassettlåset medan du stänger slutaren. När den är stängd tar du bort nyckeln eller pennan.

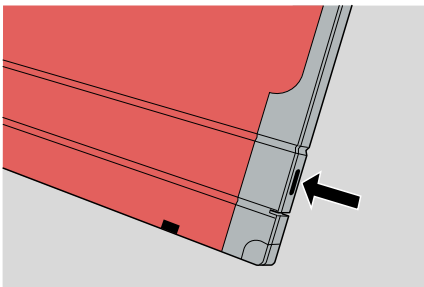

## 8 | Rengöring av CR MD4.0T- och CR MM3.0T-bildplattor och -fack | Rengöring av fack och bildplatta



*Obs: Efter rengöringen måste bildplattan raderas innan den kan användas.*