

CR MD4.0T ve CR MM3.0T görüntü plakası ve tepsisinin temizlenmesi

İindekiler

Tepsi ve Görüntü Plakasının Temizlenmesi	3
Tepsi ve görüntü plakası ne zaman temizlenir?	4
İzin verilen temizlik ürünleri nelerdir?	5
Tepsi ve görüntü plakası nasıl temizlenir?	6

Tepsi ve Görüntü Plakasının Temizlenmesi



Not: Lütfen, temizlik yaparken tepsi ve görüntü plakası takımının her zaman aynı kasete konulduğundan emin olun. Görüntü plakasının başka bir görüntü plakası için başlatılan bir tepsi ile birlikte yerleştirilmemesi önemlidir

Konular:

- *Tepsi ve görüntü plakası ne zaman temizlenir?*
- *İzin verilen temizlik ürünleri nelerdir?*
- *Tepsi ve görüntü plakası nasıl temizlenir?*

Tepsi ve görüntü plakası ne zaman temizlenir?

Kasetin iç astarı müflondan yapılmıştır. Böylece, elektrostatik boşalmaya ve görüntü plakalarının üzerinde toz birikmesine karşı önemli ölçüde koruma sağlanır. Bununla birlikte CR MD4.xT görüntü plakalarının ayda en az bir kez ya da röntgen görüntülerinde gözle görülür partiküller olduğundan şüpheleniliyorsa temizlenmesi önerilir. Aşırı tozlu olması ya da oldukça kuru koşullarda olması halinde daha sık temizlik yapılması gerekmektedir.

CR MM3.xT görüntü plakası daha sık temizlik gerektirir: en az haftada bir kez ya da her 200 kullanımdan sonra (hangisi önce gelirse).


İzin verilen temizlik ürünleri nelerdir?

- CR MD4.xT General görüntü plakaları için görüntü plakasını temizlemek üzere yalnızca AGFA CR Phosphor Plate Cleaner ve yumuşak havsız selüloz bez veya Polynit bez kullanın.
- CR MM3.0T Mammo görüntü plakaları için görüntü plakasını temizlemek amacıyla, sadece AGFA CR Phosphor Plate Cleaner (Fosfor Plaka Temizleyici) ve Polynit bezler kullanın.
- Tepsiyi temizlemek için, sadece kuru bez kullanın ya da olası tozu basınçlı hava ile temizleyin.


Tepsi ve görüntü plakası nasıl temizlenir?

Tepsi ve görüntü plakasını temizlemek için:

1. Kapağı açmak için kaset kilidine bir anahtar ya da kalem sokun.

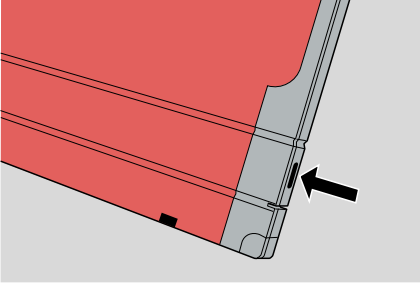


2. Anahtar ya da kalemi çıkarın.
3. Siyah tüp tarafı üste gelecek şekilde kaseti çevirin.
4. Her iki başparmağınızla kapağı tutun ve siyah tepsi ile görüntü plakasını dikkatli bir biçimde masanın üstüne çıkarın.

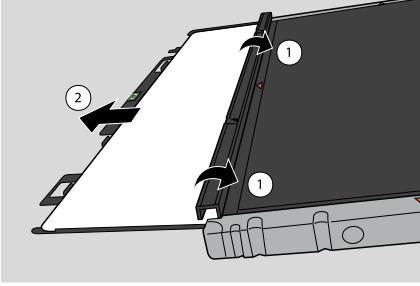

5. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, siyah tepsiyi görüntü plakası ile birlikte kasete koyun.

Tepsinin 2 küçük kancası vardır. Kancalar kasetin kenarına ulaşacak şekilde tepsiyi kasete koyun. Böylece, tepsi ve görüntü plakasının bükülmesi önlenir.

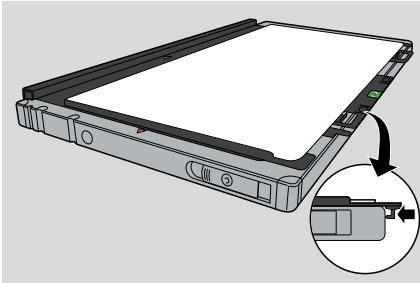


6. Görüntü plakası ve tepsiyi aşağıdaki şekilde temizleyin:

- Uygun bir mendil alın veya bezi temizlik maddesi ile nemlendirerek **görüntü plakasının yüzeyini** hafif ve eşit bir biçimde silin.
- Çözücülerin buharlaşması için, **görüntü plakası yüzeyini** yaklaşık 10 dakika kurumaya bırakın.
- **Tepsiyi** iyice temizlemek için, sadece kuru bez kullanın ya da olası tozu basınçlı hava (hazır basınçlı hava) ile temizleyin. (TEPSİYİ TEMİZLEMEK İÇİN EKRAN TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.)
- Görüntü plakası yüzeyi kuruyunca (yaklaşık 10 dakika sonra), tepsi ve görüntü plakasını kasete yerleştirmeden önce, malzeme parçacıkları ve diğer yabancı maddelerin kalıp kalmadığını tekrar kontrol edin.

7. Tepsiyi görüntü plakası ile birlikte kasete yerleştirin.

Beyaz fosforlu tarafın kasetin siyah boru tarafına yönlendirildiğinden ve kapağın görüntü plakasını çizmediğinden emin olun.

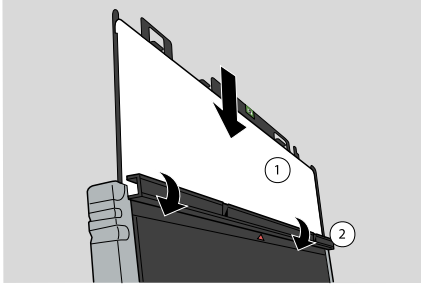


1. Beyaz fosforlu taraf
2. Kasedin siyah tüp tarafı



Uyarı: Görüntü plakasını mutlaka dikkatli bir şekilde içeri yerleştirin. Plakanın kasetin içine dik bir şekilde düşmesine izin vermeyin! Fosforun hasar görmesine neden olur.

8. Siyah tepsiyi görüntü plakası ile birlikte kasete tamamen yerleştirdikten sonra, kapağı kapatın.

Kapağı kolayca kapatmak için, kapağı kapatırken kaset kilidine bir anahtar ya da kalem sokun. Kapandıktan sonra anahtar ya da kalemi çıkarın.

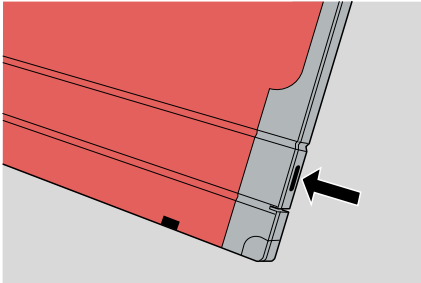

8 | CR MD4.0T ve CR MM3.0T görüntü plakası ve tepsinin temizlenmesi | Tepsi ve Görüntü Plakasının Temizlenmesi



Not: Temizleme sonrasında kullanmadan önce görüntü plakasının silinmesi gerekmektedir.