

清潔 CR MD4.0T 與 CR MM3.0T 的 IP 板和托盤

內容

清潔托盤和 IP 板	3
何時清潔托盤和 IP 板？	4
可用的清潔產品為何？	4
如何清潔托盤和 IP 板？	5

清潔托盤和 IP 板



注意：清潔時，請務必確認托盤和IP板組是被送入同一個片匣。請勿將某IP板和某個已為其他IP板初始化的托盤放置在一起，這點相當重要。

主題：

- *何時清潔托盤和 IP 板？*
- *可用的清潔產品為何？*
- *如何清潔托盤和 IP 板？*

何時清潔托盤和 IP 板？

片匣的內襯由薄墊片組成。這確保 IP 板具有高度的防靜電充荷及防灰塵積聚的保護作用。但是，仍建議您每個月至少清潔一次，或在 X 光影像上看見可疑粒子時立即清潔 CR MD4.xT IP 板。如果環境的灰塵太多或太乾燥，亦必須時常清潔。

必須經常清潔 CR MM3.xT IP 板：至少一週一次，或每使用 200 次之後清潔一次（以先達到者為準）。


可用的清潔產品為何？

- 針對 CR MD4.xT General IP 板，請僅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和不含毛絮的軟布或 Polynit 擦拭布來清潔 IP 板。
- 針對 CR MM3.0T Mammo IP 板，請僅使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布來清潔 IP 板。
- 清潔托盤時，請只使用乾布或用壓縮空氣將所有可能的灰塵清除。


如何清潔托盤和 IP 板？

要清潔托盤和 IP 板：

1. 將鑰匙或筆插入片匣鎖，開啟遮色片。

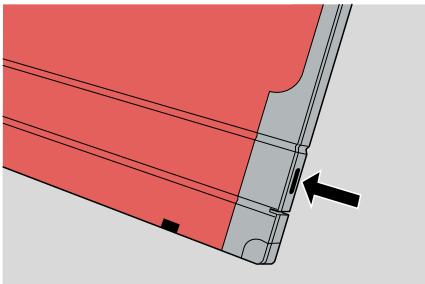


2. 拔除鑰匙或筆。
3. 翻轉片匣，讓黑色管側朝上。
4. 用雙手拇指按住遮色片，謹慎地讓黑色托盤和 IP 板滑出至器械台上。

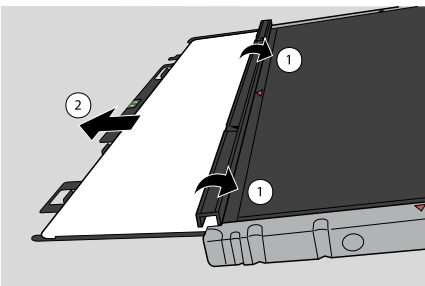

5. 將黑色托盤和 IP 板放到片匣上，如下圖所示。

托盤有 2 個小鉤。將托盤放到片匣上，使小鉤能攀過片匣的邊框。這樣可以防止托盤和 IP 板彎曲。

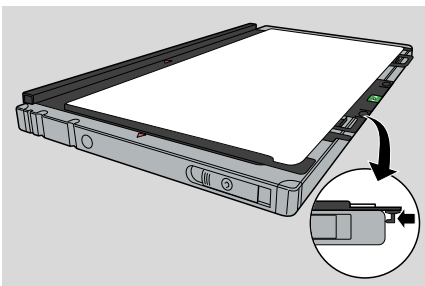

6. 請按照下列方法清潔 IP 板和托盤：


- 使用適當的擦布或用清潔劑沾濕擦布，輕柔並均勻擦拭 IP 板的表面。
- 靜待 10 分鐘等 IP 板表面風乾，讓溶液完全揮發掉。

6 | 清潔 CR MD4.0T 與 CR MM3.0T 的 IP 板和托盤 | 清潔托盤和 IP 板

- 清潔托盤時，請只使用乾布或用壓縮空氣將所有可能的灰塵清除。（請勿使用螢幕清潔劑清潔托盤。）
- 等到 IP 板表面乾燥後（約 10 分鐘），將托盤和 IP 板組放入片匣前請再檢查是否還留有物質粒子或其他雜質。

7. 將托盤和 IP 板放回片匣中。

請確認白色磷面朝向片匣的黑色管側，如此，遮色片就不會刮傷 IP 板。

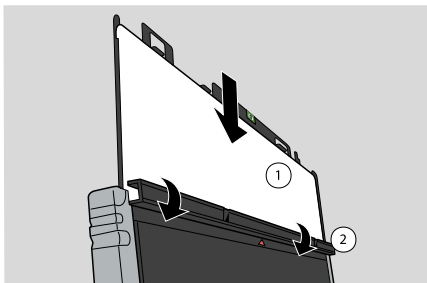


1. 白色磷面
2. 片匣的黑色管側



警告: 請務必小心滑入 IP 板。請勿使 IP 板豎直掉落到片匣中！這樣會導致磷光體損壞。

8. 當黑色托盤與 IP 板完全進入片匣時，請關上遮色片。

若要更輕鬆地關上遮色片，請在關閉遮色片時將鑰匙或筆插入片匣鎖。關閉後，請拔除鑰匙或筆。

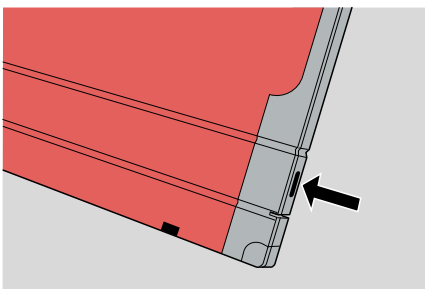

注意: 清潔後，必須先將 IP 板消磁才能使用。