

Curățarea plăcii de imagini și a tăviței pentru CR MD4.0T și CR MM3.0T

Cuprins

Curățarea tăviței și a plăcii de imagini	3
Când trebuie curățate tăvița și placa de imagini?	4
Produsele de curățare permise?	5
Cum trebuie curățate tăvița și placa de imagini?	6

Curățarea tăviței și a plăcii de imagini



Observație: Aveți grijă ca setul format din tăviță și placa de imagini să fie întotdeauna introdus în aceeași casetă în momentul curățării. Este important ca o placă de imagini să nu fie utilizată împreună cu o tăviță inițializată pentru o altă placă de imagini.

Subiecte:

- *Când trebuie curățate tăvița și placa de imagini?*
- *Produsele de curățare permise?*
- *Cum trebuie curățate tăvița și placa de imagini?*

Când trebuie curățate tăvița și placa de imagini?

Stratul interior al casetei este fabricat din fleece. Acesta asigură un înalt grad de protecție împotriva încărcării electrostatice și a acumulării de praf pe plăcile de imagini. Cu toate acestea, se recomandă să curățați plăcile de imagini ale CR MD4.xT cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori credeți că există particule care vor apărea pe radiografii. Curățarea mai frecventă este necesară în cazul unei acumulări masive de praf sau atunci când mediul de lucru este foarte uscat.

Placa de imagini pentru CR MM3.xT trebuie curățată mai des: cel puțin o dată pe săptămână sau după 200 de cicluri (oricare situație survine prima).


Produsele de curățare permise?

- Plăcile de imagini pentru CR MD4.xT General trebuie curățate numai cu AGFA CR Phosphor Plate Cleaner și o lavetă din celuloză care nu lasă scame sau cu șervețele Polynit.
- Pentru a curăța plăcile de imagini pentru CR MM3.0T Mammo, folosiți numai substanța de curățare AGFA CR Phosphor Plate Cleaner și șervețelele Polynit.
- Pentru a curăța tăvița, folosiți numai o lavetă uscată sau îndepărtați praful prin suflare cu aer comprimat.


Cum trebuie curățate tăvița și placa de imagini?

Pentru a curăța tăvița și placa de imagini:

1. Introduceți o cheie sau un instrument de scris în dispozitivul de blocare a casetei pentru a deschide obturatorul.

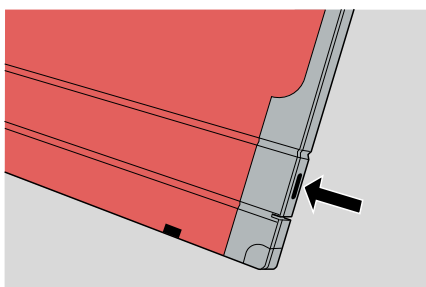


2. Scoateți cheia sau instrumentul de scris.
3. Întoarceți caseta, astfel încât partea de culoare neagră, orientată către tubul de radiografiere, să ajungă sus.
4. Trageți înapoi obturatorul cu ambele degete mari și lăsați tăvița de culoare neagră și placa de imagini să alunece ușor pe masă.

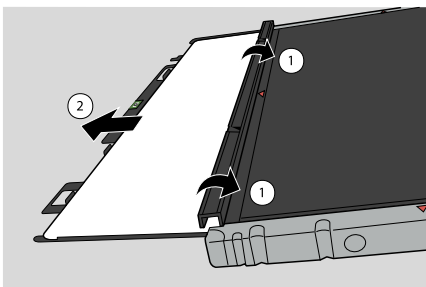

5. Așezați tăvița de culoare neagră cu placa de imagini pe casetă, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

Tăvița prezintă două urechi mici. Așezați tăvița pe casetă astfel încât urechile să depășească marginea casetei. Acest lucru împiedică îndoirea tăviței și a plăcii de imagini.

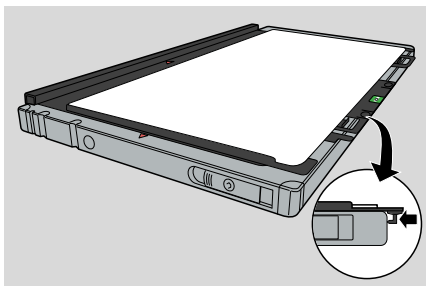


6. Curățați placa de imagini și tăvița după cum urmează:

- Ștergeți ușor și uniform **suprafața plăcii de imagini** cu un șervețel adecvat sau cu laveta umezită cu soluția de curățare.
- Lăsați **suprafața plăcii de imagini** să se usuce timp de aproximativ 10 minute, pentru a permite evaporarea solvenților.
- Pentru a curăța bine **tăvița**, folosiți numai o lavetă uscată sau îndepărtați praful prin suflare cu aer comprimat. (NU FOLOSIȚI O SUBSTANȚĂ DE CURĂȚARE A ECRANULUI PENTRU A CURĂȚA TĂVIȚA).
- După ce suprafața plăcii de imagini s-a uscat (după aproximativ 10 minute), verificați din nou dacă există particule de material și alte impurități înainte de a introduce setul format din tăviță și placa de imagini în casetă.

7. Reintroduceți tăvița cu placa de imagini în casetă.

Verificați dacă partea albă din fosfor este orientată către partea de culoare neagră a casetei, orientată către tubul de radiografiere, și dacă obturatorul zgârie cumva placa de imagini.

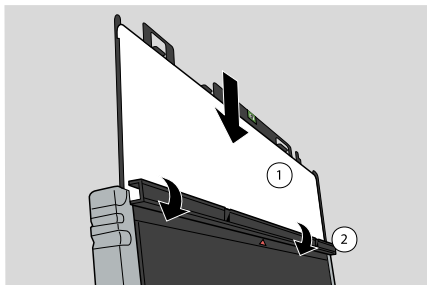

1. Partea albă din fosfor
2. Partea neagră a casetei, orientată către tubul de radiografiere




Avertisment: Împingeți ușor placa de imagini. Nu o lăsați să alunece de sus în casetă! Partea din fosfor se poate deteriora.

8. Atunci când tăvița de culoare neagră cu placa de imagini este complet introdusă în casetă, închideți obturatorul.

Pentru a închide cu ușurință obturatorul, introduceți o cheie sau un instrument de scris în dispozitivul de blocare a casetei în timp ce închideți obturatorul. Odată închis, scoateți cheia sau instrumentul de scris.

8 | Curățarea plăcii de imagini și a tăviței pentru CR MD4.0T și CR MM3.0T | Curățarea tăviței și a plăcii de imagini

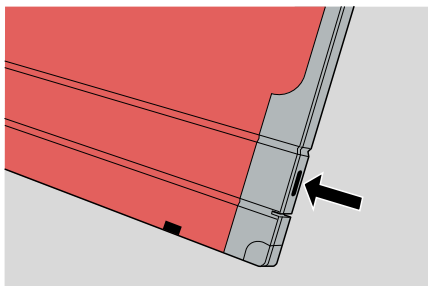

Observație: După ce ați curățat placa de imagini, ștergeți-o înainte de a o utiliza.