

**Καθαρισμός της  
ακτινογραφικής πλάκας και  
δίσκου του CR MD4.0T και CR  
MM3.0T**

# Περιεχόμενα

Καθαρισμός του δίσκου και της ακτινογραφικής πλάκας .....	3
Πότε χρειάζεται να καθαρίσω το δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα; .....	4
Επιτρεπόμενα προϊόντα καθαρισμού; .....	5
Πώς να καθαρίσω τον δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα; .....	6

# Καθαρισμός του δίσκου και της ακτινογραφικής πλάκας

---



*Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το σετ δίσκου και ακτινογραφικής πλάκας πηγαίνει πάντοτε στην ίδια κασέτα κατά τον καθαρισμό. Είναι σημαντικό μια ακτινογραφική πλάκα να μην τοποθετείται μαζί με ένα δίσκο που έχει ενεργοποιηθεί για μια άλλη ακτινογραφική πλάκα.*

## Θέματα:

- *Πότε χρειάζεται να καθαρίσω το δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα;*
- *Επιτρεπόμενα προϊόντα καθαρισμού;*
- *Πώς να καθαρίσω τον δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα;*

## **Πότε χρειάζεται να καθαρίσω το δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα;**

---

Η εσωτερική επένδυση της κασέτας είναι από μάλλινο πανί. Αυτό εξασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας από την ηλεκτροστατική φόρτιση και τη συγκέντρωση σκόνης στις ακτινογραφικές πλάκες. Ωστόσο, συνιστάται να καθαρίζετε τις ακτινογραφικές πλάκες του CR MD4.xT τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή οποτεδήποτε υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ορατότητα σωματιδίων στις ακτινογραφίες. Πιο συχνός καθαρισμός απαιτείται σε περίπτωση υπερβολικής σκόνης ή σε πάρα πολύ ξηρές συνθήκες.

Η ακτινογραφική πλάκα CR MM3.xT απαιτεί πιο τακτικό καθαρισμό: τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή μετά από κάθε 200 κύκλους (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).

## **Επιτρεπόμενα προϊόντα καθαρισμού;**

---


- Για τις ακτινογραφικές πλάκες CR MD4.xT General χρησιμοποιείτε μόνο AGFA CR Phosphor Plate Cleaner και ένα μαλακό πανί κυτταρίνης που δεν αφήνει χνούδι ή μαντιλάκια Polynit για να καθαρίζετε την ακτινογραφική πλάκα.
- Για τις ακτινογραφικές πλάκες CR MM3.0T Mammo, χρησιμοποιήστε μόνο καθαριστικό AGFA CR Phosphor Plate Cleaner και μαντηλάκια Polynit για να καθαρίσετε την πλάκα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί ή απομακρύνετε τυχόν σκόνη φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα για να καθαρίσετε τον δίσκο.

## Πώς να καθαρίσω τον δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα;


---

Για να καθαρίσετε το δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα:

1. Εισαγάγετε ένα κλειδί ή ένα στυλό στην υποδοχή ασφάλισης της κασέτας για να ανοίξετε το κλείστρο.

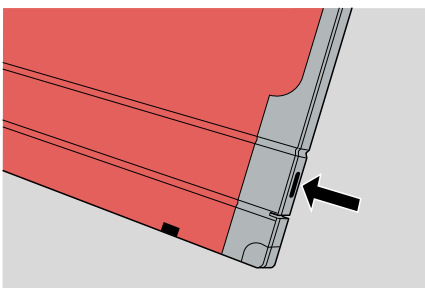


2. Αφαιρέστε το κλειδί ή το στυλό.
3. Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά, ώστε η μαύρη πλευρά λυχνίας να βρίσκεται από πάνω.
4. Συγκρατήστε το κλείστρο και με τους δύο αντίχειρες και αφήστε προσεκτικά τον μαύρο δίσκο και την ακτινογραφική πλάκα να ολισθήσουν στο τραπέζι.

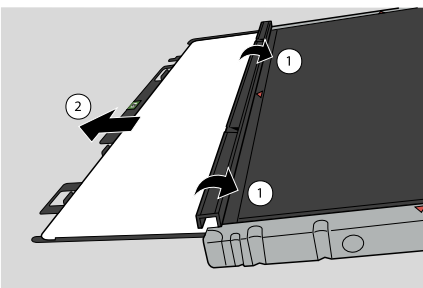

5. Τοποθετήστε τον μαύρο δίσκο με την ακτινογραφική πλάκα στην κασέτα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Ο δίσκος έχει 2 μικρά άγκιστρα. Τοποθετήστε τον δίσκο επάνω στην κασέτα, έτσι ώστε τα άγκιστρα να εκτείνονται επάνω από το όριο της κασέτας. Αυτό χρειάζεται για να αποφευχθεί η κάμψη του δίσκου και της ακτινογραφικής πλάκας.

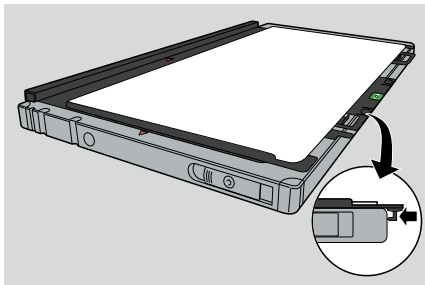


6. Καθαρίστε την ακτινογραφική πλάκα και τον δίσκο με τον ακόλουθο τρόπο:

- Πάρτε ένα κατάλληλο μαντιλάκι ή υγράνετε το πανί με καθαριστικό και σκουπίστε την **επιφάνεια της ακτινογραφικής πλάκας** απαλά και ομοιόμορφα.
- Αφήστε την **επιφάνεια της ακτινογραφικής πλάκας** να στεγνώσει για 10 λεπτά περίπου, ώστε να εξατμισθούν οι διαλύτες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί ή απομακρύνετε τυχόν σκόνη φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα (από δοχείο) για να καθαρίσετε τον **δίσκο**. (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ.)
- Όταν η επιφάνεια της ακτινογραφικής πλάκας έχει στεγνώσει (μετά από περίπου 10 λεπτά), ελέγξτε ακόμη μια φορά εάν υπάρχουν σωματίδια υλικού ή άλλες ακαθαρσίες πριν τοποθετήσετε το σετ δίσκου και ακτινογραφικής πλάκας μέσα στην κασέτα.

7. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ακτινογραφική πλάκα πίσω στην κασέτα.

Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά λευκού φωσφόρου είναι στραμμένη προς στη μαύρη πλευρά λυχνίας της κασέτας και ότι το κλείστρο δεν γρατζουνάει την ακτινογραφική πλάκα.

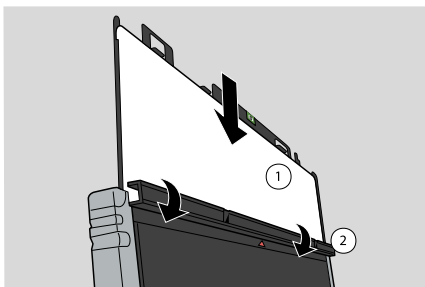

1. Πλευρά λευκού φωσφόρου
2. Μαύρη πλευρά λυχνίας της κασέτας




**Προειδοποίηση:** Βεβαιωθείτε ότι έχει γλιστρήσει προσεχτικά μέσα στην ακτινογραφική πλάκα. Μην αφήσετε την πλάκα να πέσει κάθετα μέσα στην κασέτα! Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φώσφορο.

## 8 | Καθαρισμός της ακτινογραφικής πλάκας και δίσκου του CR MD4.0T και CR MM3.0T | Καθαρισμός του δίσκου και της ακτινογραφικής πλάκας

8. Όταν ο μαύρος δίσκος με την ακτινογραφική πλάκα έχει εισαχθεί πλήρως στην κασέτα, κλείστε το κλείστρο.

Για να κλείσετε το κλείστρο με ευκολία, εισαγάγετε ένα κλειδί ή ένα μολύβι στο κλείδωμα της κασέτας καθώς κλείνετε το κλείστρο. Όταν το κλείσετε, αφαιρέστε το κλειδί ή το στυλό.

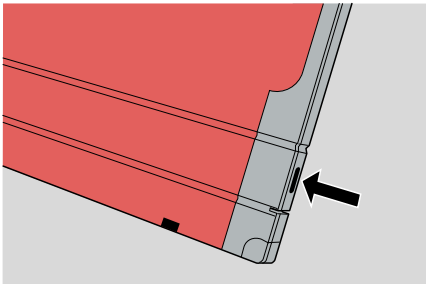

*Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό, είναι απαραίτητο να διαγραφεί η ακτινογραφική πλάκα πριν χρησιμοποιηθεί.*