

Limpeza da chapa de imagem e do tabuleiro do CR MD4.0T e do CR MM3.0T

Índice

Limpeza da gaveta e chapa de imagem	3
Quando deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?	4
Quais os produtos de limpeza autorizados?	5
Como deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?	6

Limpeza da gaveta e chapa de imagem



Nota: Depois da limpeza, verifique sempre se introduziu o conjunto da gaveta e chapa de imagem na mesma cassete. É importante que uma chapa de imagem não seja colocada juntamente com uma gaveta inicializada para outra chapa de imagem.

Tópicos:

- *[Quando deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?](#)*
- *[Quais os produtos de limpeza autorizados?](#)*
- *[Como deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?](#)*

Quando deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?

O forro interior da cassete é feito de feltro. Isto garante um alto nível de protecção contra descargas electrostáticas e acumulação de pó nas chapas de imagem. No entanto, é aconselhável limpar as chapas de imagem do CR MD4.xT pelo menos uma vez por mês ou sempre que houver dúvidas sobre as partículas visíveis nas imagens de raios-X. No entanto, é necessário limpá-las com maior frequência, se houver muito pó ou o ar estiver muito seco.

As chapas de imagem CR MM3.xT necessitam de ser limpas mais vezes: pelo menos uma vez por semana ou depois de cada 200 ciclos (conforme o que ocorrer primeiro).


Quais os produtos de limpeza autorizados?

- Para limpar as chapas de imagem CR MD4.xT General utilize apenas o AGFA CR Phosphor Plate Cleaner e um pano de celulose macio que não largue fios ou panos de limpeza Polynit.
- Para limpar as chapas de imagem CR MM3.0T Mammo utilize apenas o AGFA CR Phosphor Plate Cleaner e panos de limpeza Polynit.
- Para limpar a gaveta, utilize apenas um pano seco ou assopre o pó que possa existir com ar comprimido.


Como deve limpar a gaveta e a chapa de imagem?

Para limpar a gaveta e a chapa de imagem:

1. Introduza uma chave ou uma caneta no fecho da cassette para abrir o obturador.

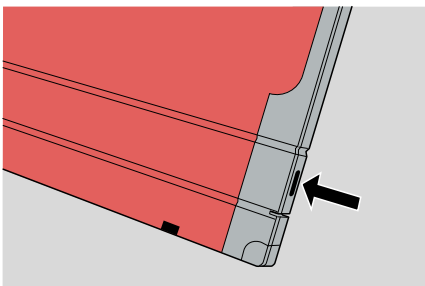


2. Retire a chave ou caneta.
3. Rode a cassette de maneira a que o lado do tubo preto fique em cima.
4. Puxe para trás e segure o obturador com ambos os polegares e deixe a gaveta preta e a chapa de imagem deslizar com cuidado para cima da mesa.

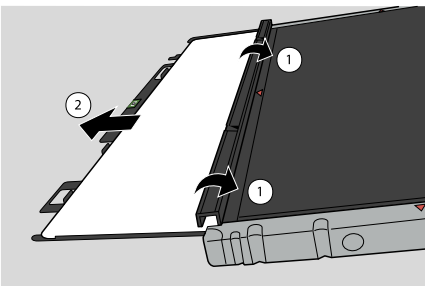


5. Coloque a gaveta preta com a chapa de imagem na cassette, como se mostra na figura abaixo.

A gaveta tem 2 ganchos pequenos. Coloque a gaveta na cassette de maneira a que os ganchos cheguem à parte de cima da borda da cassette. Isto evita que a gaveta e a chapa de imagem se dobrem.

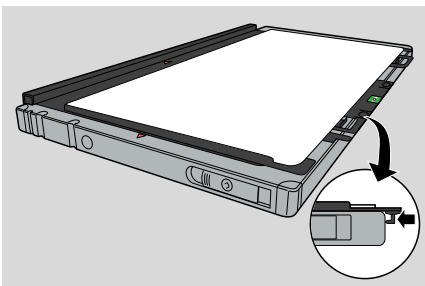

6. Limpe a chapa de imagem e a gaveta fazendo o seguinte:
 - Use um pano de limpeza apropriado ou humedeça um pano com líquido de limpeza e limpe a **superfície da chapa de imagem** uniformemente e com suavidade.
 - Deixe a **superfície da chapa de imagem** secar durante cerca de 10 minutos para que os solventes se evaporem.
 - Para limpar a **gaveta**, utilize apenas um pano seco ou assopre o pó que possa existir com ar comprimido (ar comprimido em lata) . (NÃO LIMPE A GAVETA COM UM PRODUTO DE LIMPEZA PARA ECRÃS).
 - Quando a superfície da chapa de imagem estiver seca (passados cerca de 10 minutos), verifique uma vez mais se a chapa ainda tem partículas de material ou outras impurezas, antes de colocar o conjunto da gaveta e a chapa de imagem na cassette.
7. Volte a colocar a gaveta com a chapa de imagem dentro da cassette.

Verifique se o lado de fósforo branco está virado para o lado do tubo preto da cassette e se o obturador não está a riscar a chapa de imagem.

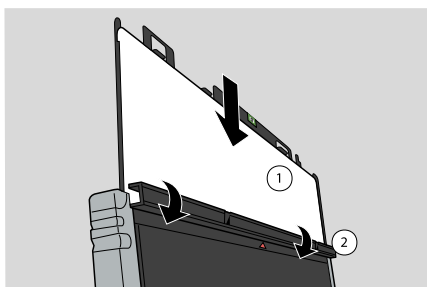


1. Lado de fósforo branco
2. Lado do tubo preto da cassette



Aviso: Faça deslizar a chapa de imagem com cuidado para dentro da cassette. Não deixe cair a chapa na vertical dentro da cassette! Se o fizer, pode danificar o fósforo.

8. Quando a gaveta preta com a chapa de imagem estiver completamente dentro da cassette, feche o obturador.

Para fechar o obturador facilmente, introduza uma chave ou uma caneta no fecho da cassette enquanto fecha o obturador. Uma vez fechado, retire a chave ou caneta.

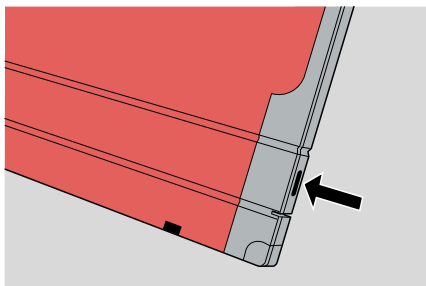

8 | Limpeza da chapa de imagem e do tabuleiro do CR MD4.0T e do CR MM3.0T | Limpeza da gaveta e chapa de imagem



Nota: Depois da limpeza, é necessário apagar a chapa de imagem antes da utilização.