

**CR MD4.0T ja CR MM3.0T  
kujutiseplaadi ning salve  
puhastamine**

# Sisukord

Salve ja kujutiseplaadi puhastamine .....	3
Millal salve ja kujutiseplaati puhastada? .....	4
Lubatud puhastusvahendid? .....	5
Kuidas salve ja kujutiseplaati puhastada? .....	6

## Salve ja kujutiseplaadi puhastamine

---



*Märkus: Puhastamisel veenduge, et salv ja kujutiseplaat asetatakse alati tagasi samasse kassetti. On oluline, et kujutiseplaati ei kasutataks koos teise kujutiseplaadi jaoks lähtestatud salvega.*

### **Teemad:**

- *Millal salve ja kujutiseplaati puhastada?*
- *Lubatud puhastusvahendid?*
- *Kuidas salve ja kujutiseplaati puhastada?*

## **Millal salve ja kujutiseplaati puhastada?**

---

Kasseti sisevooder on valmistatud fliisist. See tagab väga hea kaitse elektrostaatiliste laengute ja tolmu kogunemise eest kujutiseplaatidele. Sellest hoolimata on soovitatav puhastada CR MD4.xT kujutiseplaate vähemalt kord kuus või siis, kui on kahtlusi, et röntgenipildidel esineb kõrvalisi osakesi. Sagedasem puhastamine on vajalik ka liigse tolmu või väga kuivade ruumide korral.

CR MM3.xT kujutiseplaati tuleb puhastada sagedamini: vähemalt kord nädalas või pärast iga 200 tsükli (sõltuvalt sellest, kumb enne kätte jõuab).

## Lubatud puhastusvahendid?

---


- CR MD4.xT Generali kujutiseplaatide puhastamiseks kasutage üksnes toodet AGFA CR Phosphor Plate Cleaner ja pehmet udemeteta tsellulooslappi või Polyniti puhastuslappe.
- CR MM3.0T Mammo kujutiseplaatide puhastamiseks kasutage üksnes toodet AGFA CR Phosphor Plate Cleaner ja Polyniti puhastuslappe.
- Kasutage salve puhastamiseks üksnes kuiva lappi või eemaldage võimalik tolm suruõhuga.

## Kuidas salve ja kujutiseplaati puhastada?


---

Salve ja kujutiseplaadi puhastamine:

1. Katiku avamiseks pistke kasseti lukku võti või pliiaats.

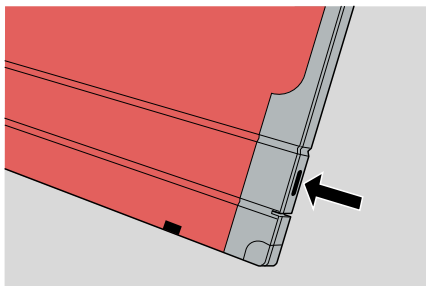


2. Eemaldage võti või pliiaats.
3. Pöörake kassett ringi, nii et röntgenitoru poolne must külg on pealpool.
4. Hoidke katikut mõlema pöidlaga kinni ja laske mustal salvel ning kujutiseplaadil ettevaatlikult lauale libiseda.

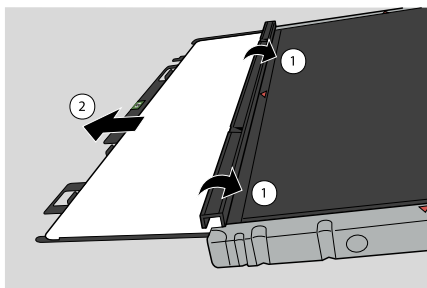

5. Pange must salv koos kujutiseplaadiga kassetile nii, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Salvel on 2 väikest konksu. Pange salv kassetile nii, et konksud ulatuvad üle kasseti serva. Sellega väldite salve ja kujutiseplaadi paindumist.

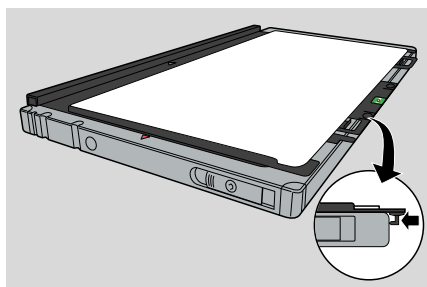


6. Puhastage kujutiseplaati ja salve järgmiselt.

- Võtke sobiv puhastuslapp või niisutage lappi puhastusvahendiga ning pühkige **kujutiseplaadi pinda** ettevaatlikult ja ühtlaselt.
- Laske **kujutiseplaadi pinnal** kuivada ligikaudu 10 minutit lahustite aurustumiseks.
- Kasutage **salve** põhjalikuks puhastamiseks üksnes kuiva lappi või eemaldage võimalik tolm suruõhuga (balloonist). (**ÄRGE KASUTAGE SALVE PUHASTAMISEKS EKRAANIPUHASTUSVAHENDIT.**)
- Kui kujutiseplaadi pind on kuiv (ligikaudu 10 minuti pärast), siis veenduge enne salve ja kujutiseplaadi komplekti tagasi kasseti viimist uuesti aineosakeste ning muude lisandite puudumises.

7. Pange salv koos kujutiseplaadiga kasseti tagasi.

Veenduge, et valge luminofooriga külg on suunatud kasseti musta röntgenitoru poolse külje poole ja et katik ei kriimusta kujutiseplaati.

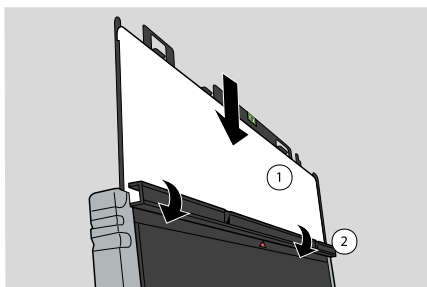


1. Valge luminofooriga külg
2. Kasseti must röntgenitoru poolne külg



**Hoiatus:** Olge kujutiseplaadi sisselibistamisel ettevaatlik. Ärge laske plaadil kukkuda vertikaalselt kasseti sisse! See kahjustab luminofoori.

8. Kui must salv koos kujutiseplaadiga on täielikult kassetis, siis sulgege katik.

Katiku sulgemise kergendamiseks pistke kasseti lukku võti või pliats. Pärast sulgemist võtke võti või pliats välja.

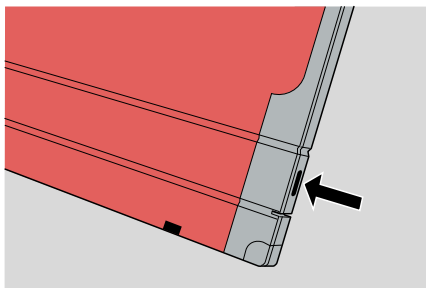



*Märkus: Puhastamise järel tuleb kujutiseplaat enne kasutamist kustutada.*