

# **Почистване на плаката за изображение и поставката на CR MD4.0T и CR MM3.0T**

# Съдържание

Почистване на поставката и плаката за изображение .....	3
Кога трябва да се почиства поставката и плаката за изображение? .....	4
Разрешени продукти за почистване? .....	5
Как трябва да се почиства поставката и плаката за изображение? .....	6

# Почистване на поставката и плаката за изображение

---



*Забележка: Моля, уверете се, че при почистване комплектът от поставка и плака за изображение винаги се поставя в една и съща касета. Важно е да не поставяте плаката за изображение заедно с поставка, инициализирана за друга плака за изображение.*

## Теми:

- *Кога трябва да се почиства поставката и плаката за изображение?*
- *Разрешени продукти за почистване?*
- *Как трябва да се почиства поставката и плаката за изображение?*

## Кога трябва да се почиства поставката и плаката за изображение?

---

Вътрешната част на касетата е покрита с вълнен плат. Това осигурява висока степен на защита срещу електростатичен заряд и натрупване на прах върху плаките за изображения. Въпреки това се препоръчва да почиствате плаките за изображения на CR MD4.xT минимум веднъж месечно или когато имате съмнение за наличие на частици, видими на рентгеновите изображения. Необходимо е по-често почистване при прекомерно натрупване на прах или при много сухи условия.

Плаката за изображение за CR MM3.xT трябва да се почиства по-често: минимум веднъж седмично или на всеки 200 цикъла (в зависимост от това кое възникне по-рано).

## **Разрешени продукти за почистване?**

---


- За почистване на плаките за изображения на CR MD4.xT General използвайте само CR Phosphor Plate Cleaner на AGFA и мека кърпа от целулоза без влакна или кърпички Polynit.
- За почистване на плаките за изображения на CR MM3.0T Mammo използвайте само CR Phosphor Plate Cleaner на AGFA и кърпички Polynit.
- За почистване на поставката използвайте само суха кърпа или премахвайте евентуалната прах чрез продухване със сгъстен въздух.

## Как трябва да се почиства поставката и плаката за изображение?


---

За да почистите поставката и плаката за изображение:

1. Поставете ключ или химикал в ключалката на касетата, за да отворите предпазния екран.

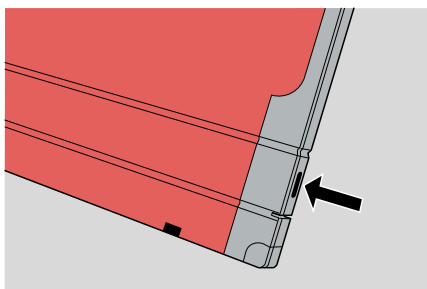


2. Извадете ключа или химикала.
3. Обърнете касетата така, че черната ѝ страна, която се насочва към рентгеновата тръба, е отгоре.
4. Задръжте предпазния екран с двата палеца и внимателно оставете черната поставка и плаката за изображение да се плъзнат върху масата.

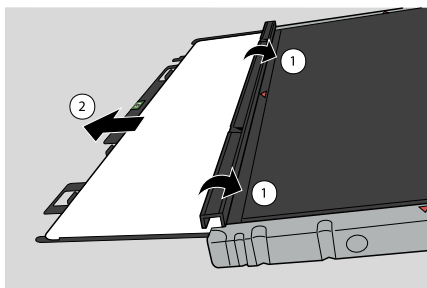

5. Поставете черната поставка с плаката за изображение върху касетата, както е показано на фигурата по-долу.

Поставката има 2 малки кукички. Поставете поставката върху касетата така, че кукичките да се подават над границата на касетата. Това се прави за избягване на огъването на поставката и плаката за изображение.

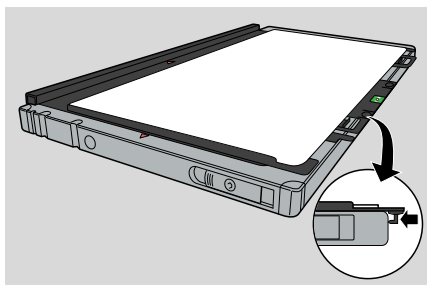


6. Почиствайте плаката за изображение и поставката, както следва:

- Вземете подходяща кърпа или навлажнете кърпата с препарат за почистване и избършете **повърхността на плаката за изображение** внимателно и равномерно.
- Оставете **повърхността на плаката за изображение** да изсъхне за около 10 минути, за да може разтворителите да се изпарят.
- За щателно почистване на **поставката** използвайте само суха кърпа или премахвайте евентуалната прах чрез продухване със сгъстен въздух (бутилка със сгъстен въздух). (НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕКРАНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОСТАВКАТА.)
- След като повърхността на плаката за изображение изсъхне (след около 10 минути), проверете още веднъж за наличие на частици от материал и други замърсявания, преди да поставите комплекта от поставка и плака за изображение в касетата.

7. Поставете поставката с плаката за изображение обратно в касетата.

Уверете се, че бялата фосфорна страна е ориентирана към черната страна на касетата, която се насочва към рентгеновата тръба, и че предпазният екран не надрасква плаката за изображение.

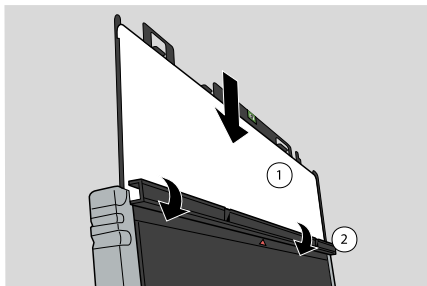


1. Бяла фосфорна страна
2. Черна страна на касетата, която се насочва към рентгеновата тръба



**Предупреждение:** Плъзнете внимателно плаката за изображение навътре. Не позволявайте на плаката да падне вертикално в касетата! Това ще повреди фосфора.

8. Когато черната поставка с плаката за изображение се намира изцяло в касетата, затворете предпазния екран.

За да затворите лесно предпазния екран, поставете ключ или химикал в ключалката на касетата, докато затваряте предпазния екран. След като го затворите, извадете ключа или химикала.

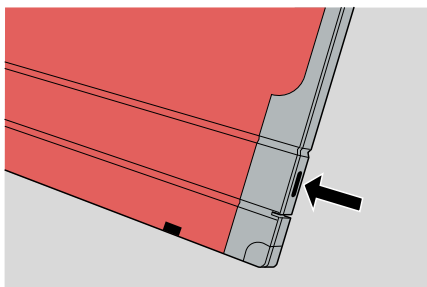

*Забележка: След почистване е необходимо да изтриете плаката за изображение, преди да я използвате.*