

# **Rengøring af billedpladen og bakken for CR MD4.0T og CR MM3.0T**

# Indhold

Rengøring af bakken og billedpladen .....	3
Hvornår skal bakken og billedpladen renses? .....	4
Tilladte rengøringsprodukter? .....	5
Hvordan skal bakken og billedpladen renses? .....	6

## Rengøring af bakken og billedpladen

---



*Bemærk: Hold øje med, at bakke- og billedpladesættet altid sættes ind i samme kassette ved rengøringen. Det er vigtigt, at billedpladen ikke sættes sammen med en bakke, der er initialiseret for en anden billedplade.*

### Emner:

- *Hvornår skal bakken og billedpladen renses?*
- *Tilladte rengøringsprodukter?*
- *Hvordan skal bakken og billedpladen renses?*

## **Hvornår skal bakken og billedpladen renses?**

---

Den indvendige beklædning af kassetten er fremstillet af filt. Dette sikrer en høj grad af beskyttelse mod elektrostatisk opladning og støvansamling på billedpladerne. Alligevel anbefales det at rengøre billedpladerne af CR MD4.xT mindst en gang om måneden eller så snart der er mistanke om, at partikler er synlige på røntgenbillederne. Der er brug for hyppigere rengøring i tilfælde af store mængder støv eller meget tørre betingelser.

CR MM3.xT billedpladen kræver hyppigere rengøring: Mindst en gang om ugen eller efter 200 cyklusser (hvad der end er tilfældet først).

## **Tilladte rengøringsprodukter?**

---


- Til CR MD4.xT General billedplader må der kun bruges AGFA CR Phosphor Plate Cleaner og en blød trævlefri celluloseklud eller Polynit-vådservietter til rensning af billedpladen.
- Brug kun AGFA CR Phosphor Plate Cleaner og Polynit-vådservietter til at rense pladen ved CR MM3.0T Mammo billedplader.
- Brug en tør klud eller blæs evt. støv væk med trykluft for at rense bakken.

## Hvordan skal bakken og billedpladen renses?


---

For at rense bakken og billedpladen:

1. Sæt en nøgle eller en kuglepennen ind i kassetelåsen for at åbne blænden.

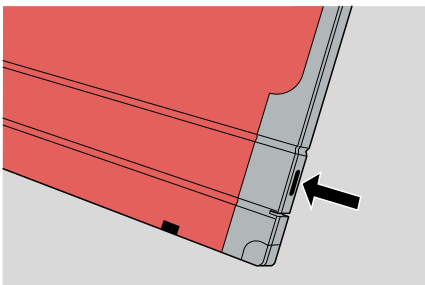


2. Fjern nøglen eller kuglepennen.
3. Vend kassetten om, således at den sorte rørside vender opad.
4. Hold fast i blænden med begge tommelfingre og lad den sorte bakke og billedpladen glide ud på bordet forsigtigt.

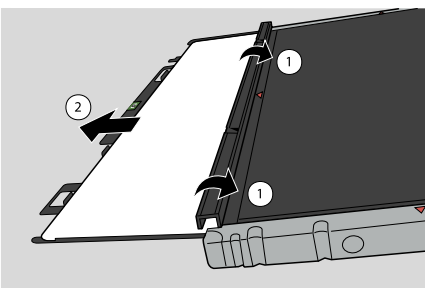

5. Placér den sorte bakke med billedpladen på kassetten, som vist i illustrationen nedenfor.


Bakken har to små kroge. Placér bakken på kassetten sådan, at krogene når over kassetten's kant. Dette sker for at undgå, at bakken og billedpladen bøjes.

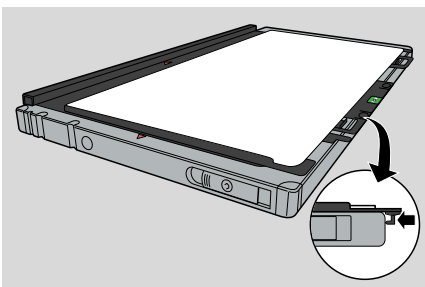

6. Rens billedpladen og bakken på følgende måde:

- Tag en egnet vådserviet eller fugt en klud med rensmidlet og tør **billedpladens overflade** af blidt og jævnt.
  - Lad **billedpladens overflade** tørre i ca. 10 minutter, således at opløsningsmidlerne kan fordampe.
  - Brug kun en tør klud eller blæs evt. støv væk med trykluft (dåseluft) for at rense **bakken** grundigt. (BRUG IKKE SKÆRMRENS TIL AT RENSE BAKKEN.)
  - Når billedpladens overflade er tør (efter ca. 10 minutter), skal man igen kontrollere den for materialepartikler og andre urenheder, inden bakken og billedpladen sættes ind i kassetten.
7. Sæt bakken med billedpladen ind i kassetten igen.

Kontrollér, at den hvide fosforside vender mod kassetts sorte rørside og at blænden ikke ridser billedpladen.

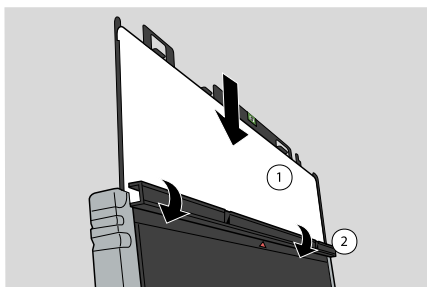


1. Hvid fosforside
2. Kassetts sorte rørside



**Advarsel:** Husk at skubbe billedpladen i forsigtigt. Lad ikke pladen falde lodret ind i kassetten! Det forårsager beskadigelse af fosforen.

8. Luk blænden, når den sorte bakke med billedpladen er helt inde i kassetten.

For at låse blænden let sæt en nøgle eller kuglepen ind i kassetts lås, mens blænden lukkes. Fjern nøglen eller kuglepenen, når blænden er låst.

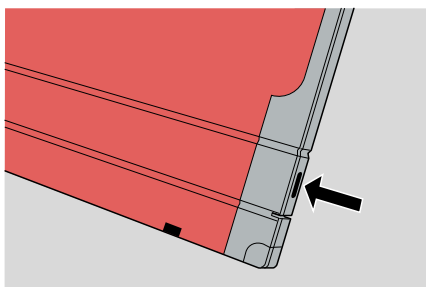

8 | Rengøring af billedpladen og bakken for CR MD4.0T og CR MM3.0T | Rengøring af bakken og billedpladen



*Bemærk: Efter rensningen skal billedpladen slettes, inden den bruges.*