

# Čiščenje plošče s sliko in pladnja za CR MD4.0T in CR MM3.0T

# Vsebina

Čiščenje pladnja in plošče s sliko .....	3
Kdaj očistiti pladenj in ploščo s sliko? .....	4
Dovoljeni izdelki za čiščenje? .....	5
Kako očistiti pladenj in ploščo s sliko? .....	6

## Čiščenje pladnja in plošče s sliko

---



*Opomba: Pazite, da boste pri čiščenju pladenj in ploščo s sliko dali vedno v isto kaseto. Pomembno je, da plošče s sliko ne daste skupaj z inicializiranim pladnjem za drugo ploščo s sliko.*

### **Teme:**

- *Kdaj očistiti pladenj in ploščo s sliko?*
- *Dovoljeni izdelki za čiščenje?*
- *Kako očistiti pladenj in ploščo s sliko?*

## **Kdaj očistiti pladenj in ploščo s sliko?**

---

Notranja prevleka kasete je iz flisa. Tako je zelo dobro zaščiten pred elektrostatičnim nabojem in nabiranjem prahu na plošči s sliko. Ne glede na to priporočamo čiščenje plošč s sliko CR MD4.xT najmanj enkrat mesečno ali kadar koli opazite na rentgenskih slikah vidne delce. Pogostejše čiščenje je potrebno tudi v primeru večjih količin prahu ali v zelo suhih delovnih razmerah.

Ploščo s sliko CR MM3.xT je treba očistiti tudi pogosteje: vsaj enkrat tedensko ali vsakih 200 ciklusov (kar pač nastopi prej).

## **Dovoljeni izdelki za čiščenje?**

---


- Za čiščenje plošč s sliko CR MD4.xT General uporabljajte samo čistilo za čiščenje fosfornih plošč AGFA CR Phosphor Plate Cleaner in mehko celulozno krpo, ki ne pušča muck, ali robčke Polynit.
- Za čiščenje plošče s sliko CR MM3.0T Mammo uporabite izključno čistilno sredstvo AGFA CR Phosphor Plate Cleaner in robčke Polynit.
- Uporabite le suho krpo in spihajte morebitni prah s stisnjenim zrakom, da očistite pladenj.

## Kako očistiti pladenj in ploščo s sliko?


---

Čiščenje pladnja in plošče s sliko:

1. Vstavite ključ ali pisalo v ključavnico kasete, da odprete zaklep.

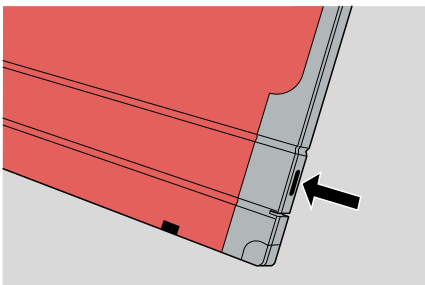


2. Odstranite ključ ali pisalo.
3. Obrnite kaseto, tako da je stran s črno cevjo na zgornji strani.
4. Zadržite zaklep z obema palcema in spustite, da črni pladenj in plošča s sliko pazljivo zdrsneto na mizo.

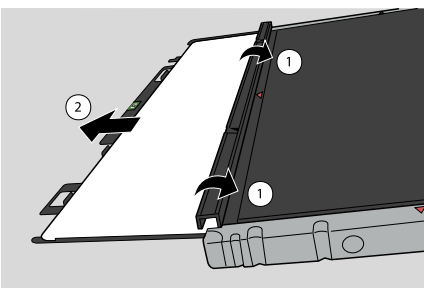

5. Črni pladenj s ploščo s sliko postavite na kaseto, kot prikazuje spodnja risba.

Pladenj ima dve majhni kljukici. Pladenj postavite na kaseto tako, da segata kljukici čez rob kasete. Tako se pladenj in plošča s sliko ne bosta ukrivila.

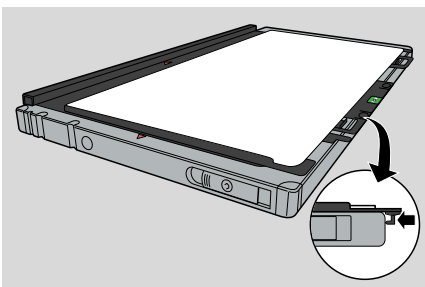


6. Očistite ploščo s sliko in pladenj, in sicer:

- Z ustreznim robčkom ali krpo, namočeno s čistilom, rahlo in enakomerno obrišite **površino plošče s sliko**.
- Počakajte kakšnih 10 minut, da se **površina plošče s sliko** posuši in da topila izhlapijo.
- Uporabite le suho krpo in spihajte morebitni prah s stisnjениm zrakom (zrakom v pločevinki) in tako skrbno očistite **pladenj**. (ZA ČIŠČENJE PLADNJA NE UPORABLJAJTE ČISTILA ZA ČIŠČENJE ZASLONA.)
- Ko je površina plošče s sliko suha (po približno 10 minutah), še enkrat preverite, ali so na njej delci materiala ali nečistoče, preden komplet pladnja in plošče s sliko vstavite v kaseto.

7. Pladenj s ploščo s sliko vstavite nazaj v kaseto.

Preverite, ali je stran z belim fosforjem usmerjena proti strani s črno cevjo na kaseti, in pazite, da zaklep ne opraska plošče s sliko.

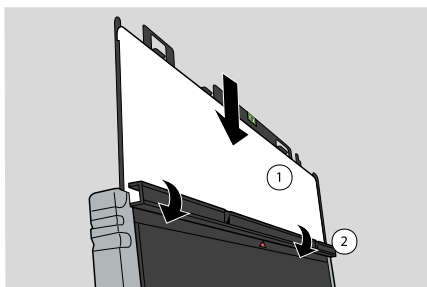


1. Stran z belim fosforjem
2. Stran s črno cevjo na kaseti



**Opozorilo:** Poskrbite, da bo plošča s sliko pazljivo zdrsela v kaseto. Ne dovolite, da bi plošča s sliko v kaseto padla naravnost navzdol! Pri tem se namreč fosfor poškoduje.

8. Ko je črni pladenj s ploščo s sliko popolnoma v kaseti, zaprite zaklep.

Da bi zaklep zaprl z lahkoto, v ključavnico na kaseti vstavite ključ ali pisalo, medtem ko zapirate zaklep. Ko je zaprt, odstranite ključ ali pisalo.

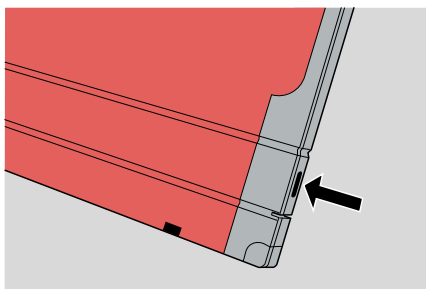

8 | Čiščenje plošče s sliko in pladnja za CR MD4.0T in CR MM3.0T | Čiščenje pladnja in plošče s sliko



*Opomba: Ko ploščo s sliko očistite, jo morate pred uporabo nujno izbrisati.*