

# **Читка сигнальных пластин и лотка для CR MD4.0T и CR MM3.0T**

# Содержание

Чистка лотка и сигнальной пластины .....	3
Когда следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины? .....	4
Допустимые чистящие средства .....	5
Каким образом следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины? .....	6

# Чистка лотка и сигнальной пластины

---



*Примечание: Следите за тем, чтобы после чистки сигнальная пластина загрузалась в кассету на соответствующем лотке. Запрещается помещать сигнальную пластину на лоток, инициализированный для работы с другой сигнальной пластиной.*

## Разделы:

- *Когда следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины?*
- *Допустимые чистящие средства*
- *Каким образом следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины?*

## **Когда следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины?**

---

Внутренняя облицовка кассет типа выполнена из ткани с густым ворсом. Таким образом обеспечена высокая степень защиты сигнальных пластин от воздействия электростатического напряжения и проникновения пыли. При этом рекомендуется чистить сигнальную пластину CR MD4.xT не менее одного раза в месяц или при подозрении на присутствие видимых пылевых частиц на рентгеновских изображениях. При этом, чистку пластин рекомендуется выполнять чаще, если оборудование эксплуатируется в чрезмерно пыльных или сухих условиях.

Чистка сигнальных пластин CR MM3.xT от загрязнений должна проводиться с более частой периодичностью: не менее одного раза в неделю или каждые 200 циклов (в зависимости от того, что наступит раньше).

## **Допустимые чистящие средства**

---


- Для чистки сигнальных пластин CR MD4.xT General применяйте только чистящее средство AGFA CR Phosphor Plate Cleaner и мягкую безворсовую целлюлозную ткань или салфетки Polynit.
- Для чистки сигнальных пластин CR MM3.0T Mammo применяйте только чистящее средство AGFA CR Phosphor Plate Cleaner и салфетки Polynit.
- Удаление пыли из лотка осуществляется сухой тканью или сжатым воздухом.

## Каким образом следует выполнять чистку лотка и сигнальной пластины?


---

Чтобы очистить лоток и сигнальную пластину:

1. Откройте шторку, вставив в замок кассеты ключ или шариковую ручку.

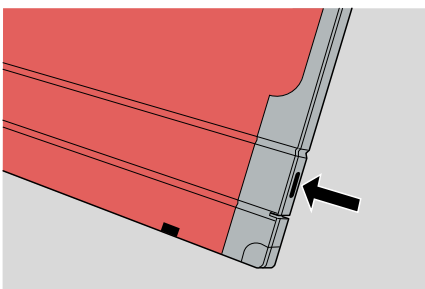


2. Извлеките ключ или шариковую ручку из замка.
3. Разверните кассету черной стороной (сторона, направленная к трубке) вверх.
4. Удерживая шторку большими пальцами обеих рук, аккуратно выпустите черный лоток с сигнальной пластиной на стол.

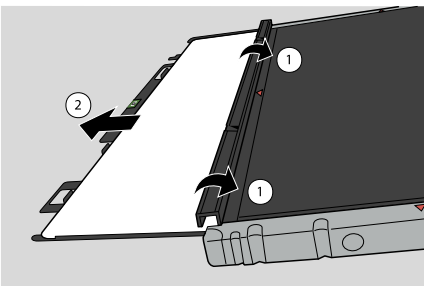

5. Разместите черный лоток с сигнальной пластиной на кассете, как показано на рисунке ниже.

Лоток имеет два небольших крюка. Разместите лоток на кассете так, чтобы крюки заходили за верхний край кассеты. Таким образом, вы сможете предупредить сгибание лотка и сигнальной пластины.

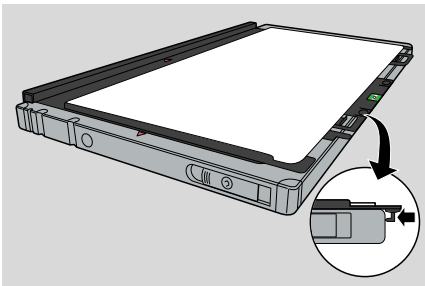


6. Выполните чистку сигнальной пластины и лотка следующим образом:

- Соответствующей чистящей салфеткой или тканью, смоченной в чистящем средстве, мягкими движениями равномерно протрите **поверхность сигнальной пластины**.
- Дайте **поверхности сигнальной пластины** высохнуть в течение 10 минут, до полного испарения растворителя.
- Качественное удаление пыли из **лотка** возможно только в случае, если для этого используется сухая ткань или сжатый воздух (из баллонов). (НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДСТВО SCREEN CLEANER ДЛЯ ЧИСТКИ ЛОТКА).
- Перед тем, как вставить лоток и сигнальную пластину с высохшей поверхностью (приблизительно через 10 минут) в кассету, еще раз убедитесь в отсутствии посторонних частиц и следов загрязнения на поверхности пластины.

7. Вставьте лоток с сигнальной пластиной в кассету.

Убедитесь в том, что белая (содержащая люминофор) сторона пластины совмещена с черной (направленной к рентгеновской трубке) стороной кассеты, а шторка не царапает поверхность сигнальной пластины.

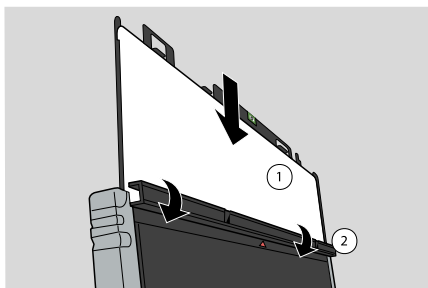

1. Белая сторона с люминофорным покрытием
2. Черная сторона кассеты, направленная к рентгеновской трубке




**Предостережение:** Осторожно вдвиньте внутрь сигнальную пластину. Не допускайте вертикального падения сигнальной пластины в кассету! В этом случае возможно повреждение люминофорного покрытия.

8. Полностью вставив черный лоток с сигнальной пластиной в кассету, закройте шторку.

Чтобы беспрепятственно закрыть шторку, вставьте в замок кассеты ключ или шариковую ручку. Закрыв шторку, извлеките ключ или шариковую ручку из замка кассеты.

8 | Чистка сигнальных пластин и лотка для CR MD4.0T и CR MM3.0T | Чистка лотка и сигнальной пластины

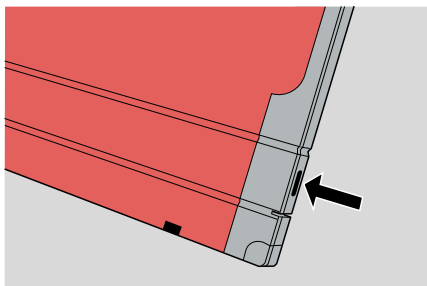

*Примечание: После чистки выполните стирание сигнальной пластины перед использованием.*