

清洁 CR MD4.0T 和 CR MM3.0T 的 IP 板和托盘

内容

清洁托盘和 IP 板	3
何时需清洁托盘和 IP 板?	4
允许使用哪些清洁产品?	4
如何清洁托盘和 IP 板?	5

清洁托盘和 IP 板



注意: 在清洁时, 请确保总是将托盘和 IP 板套件放入同一个暗盒中。千万不要将 IP 板与另一 IP 板的初始化托盘放在一起。

主题:

- *何时需清洁托盘和 IP 板?*
- *允许使用哪些清洁产品?*
- *如何清洁托盘和 IP 板?*

何时需清洁托盘和 IP 板？

暗盒的内层由条状衬垫构成。这样可有效地防止 IP 板上静电充电和尘埃聚集。尽管如此，还是建议每个月至少清洁一次 CR MD4.xT 的 IP 板，或在怀疑 X 光图像上有可见物质颗粒时进行清洁。在灰尘较多或非常干燥的条件下需要频繁清洁。

CR MM3.xT IP 板需要更加频繁地进行清洁：每周至少一次或者每 200 次循环后一次（以先满足的条件为准）。


允许使用哪些清洁产品？

- 对于 CR MD4.xT General IP 板，只能使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和柔软不起毛的纤维布或 Polynit 擦拭布来清洁 IP 板。
- 对于 CR MM3.0T Mammo IP 板，只能使用 AGFA CR Phosphor Plate Cleaner 和 Polynit 擦拭布来清洁 IP 板。
- 只能使用干布或用压缩空气吹掉可能存在的灰尘来清洁托盘。


如何清洁托盘和 IP 板？

要清洁托盘和 IP 板：

1. 将钥匙或笔插到暗盒锁内，打开蒙板。

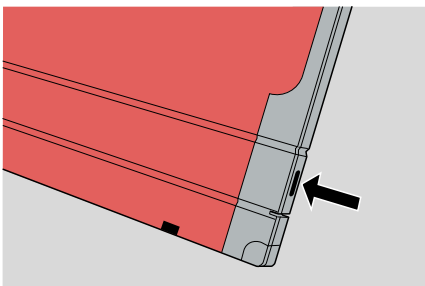


2. 移除钥匙或笔。
3. 翻转暗盒，使黑色管侧向上。
4. 用两个拇指按住蒙板，小心地将黑色托盘和 IP 板滑出到桌面上。

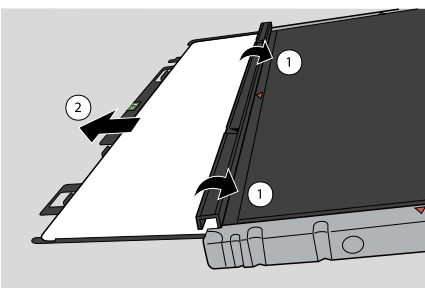

5. 如下图所示，将黑色托盘和 IP 板放到暗盒上。

托盘有 2 个小钩。将托盘放在暗盒上，使钩超过暗盒边。这可避免托盘和 IP 板弯曲。

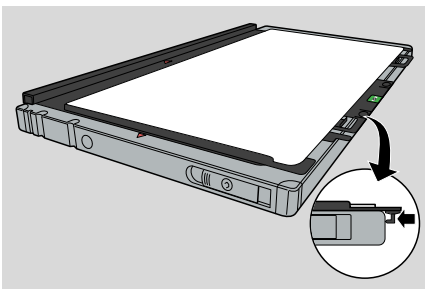

6. 按以下步骤清洁 IP 板和托盘：


- 采用适当的擦拭布或用清洁剂沾湿布，轻柔均匀地擦拭 **IP 板表面**。

6 | 清洁 CR MD4.0T 和 CR MM3.0T 的 IP 板和托盘 | 清洁托盘和 IP 板

- 将 **IP 板表面** 晾干约 10 分钟以待溶剂完全蒸发。
- 要彻底清洁 **托盘**，只能使用干布或用压缩空气（罐装空气）吹掉可能存在的灰尘。（请勿使用屏幕清洁剂清洁托盘。）
- 一旦 IP 板表面已干燥（约 10 分钟后），请再次检查有无物质颗粒和其它杂质后将托盘和 IP 板套件放入暗盒中。

7. 将托盘和 IP 板放回暗盒中。

核查白色磷光体侧是否定位到暗盒的黑色管侧，并确认蒙板未刮伤 IP 板。

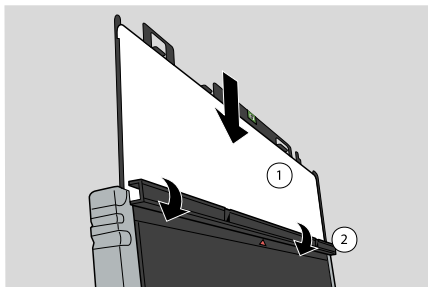


1. 白色磷光体侧
2. 暗盒的黑色管侧



警告: 确保小心地将 IP 板滑入。请勿使 IP 板垂直跌落到暗盒中！这会对磷光体造成损坏。

8. 将黑色托盘和 IP 板完全放入暗盒后，关闭蒙板。

要轻松地关闭蒙板，请在关闭蒙板时将钥匙或笔插到暗盒锁内。关闭蒙板后，移除钥匙或笔。

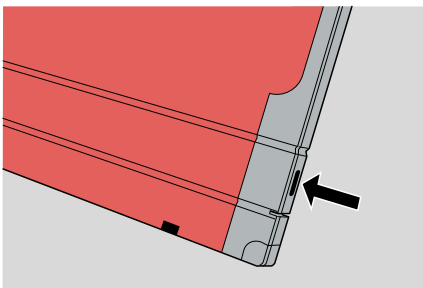

注意: 清洁完成后，必须在使用前删除 IP 板。