

**CR MD4.0T:n ja CR MM3.0T:n
kuvalevyn ja alustan
puhdistaminen**

Sisältö

Alustan ja kuvalevyn puhdistaminen	3
Milloin alusta ja kuvalevy on puhdistettava?	4
Sallitut puhdistustuotteet?	5
Miten alusta ja kuvalevy on puhdistettava?	6

Alustan ja kuvalevyn puhdistaminen



Kommentti: Varmista puhdistaessa, että laitat alusta-kuvalevy-yhdistelmän takaisin samaan kasettiin. On tärkeätä, ettei kuvalevyä laiteta yhteen toista kuvalevyä varten alustetun alustan kanssa.

Aiheet:

- *Milloin alusta ja kuvalevy on puhdistettava?*
- *Sallitut puhdistustuotteet?*
- *Miten alusta ja kuvalevy on puhdistettava?*

Milloin alusta ja kuvalevy on puhdistettava?

Kasetin sisäverhous on fleecettä. Tämä varmistaa hyvän suojan sähköstaattisia varauksia vastaan sekä pölyn kuvalevyille kertymistä vastaan. Siitä huolimatta CR MD4.xT -kuvalevyjen puhdistaminen suositellaan tehtäväksi vähintään kerran kuukaudessa tai aina, kun on syytä epäillä hiukkasten näkyvän röntgenkuvissa. Erittäin pölyisissä tai kuivissa oloissa puhdistus on suoritettava useammin.

CR MM3.xT-kuvalevy vaatii puhdistamista useammin: 200 jakson jälkeen mutta joka tapauksessa vähintään kerran viikossa.


Sallitut puhdistustuotteet?

- CR MD4.xT General -kuvalevylle käytä ainoastaan AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja pehmeää nukkaamatonta selluloosaliinaa tai Polynit-pyyhkeitä kuvalevyn puhdistamiseen.
- CR MM3.0T Mammo -kuvalevylle käytä vain AGFA CR Phosphor Plate Cleaner -puhdistusainetta ja Polynit-pyyhkeitä kuvalevyn puhdistamiseen.
- Käytä kuivaa kangasta tai puhalla pöly pois paineilmapuhaltimella.


Miten alusta ja kuvalevy on puhdistettava?

Alustan ja kuvalevyn puhdistaminen:

1. Avaa suljin työntämällä avain tai kynä kasetin lukkoon.

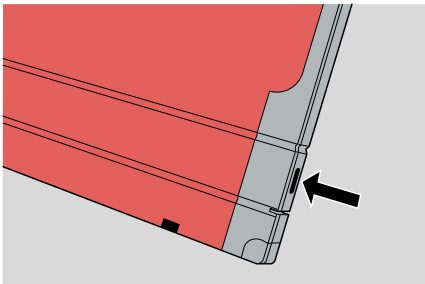


2. Poista avain tai kynä.
3. Käännä kasetti ympäri, niin että musta putkipuoli on ylöspäin.
4. Pidä sulkimesta kummallakin peukalolla kiinni ja anna mustan alustan ja kuvalevyn liukua varovasti ulos pöydälle.

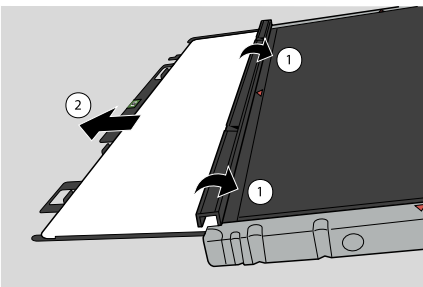

5. Aseta musta alusta ja kuvalevy kasetin päälle alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.

Alustassa on 2 pientä koukkua. Laita alusta kasettiin siten, että kummatkin koukut ulottuvat kasetin reunan yli. Näin vältetään alustan ja kuvalevyn taipuminen.

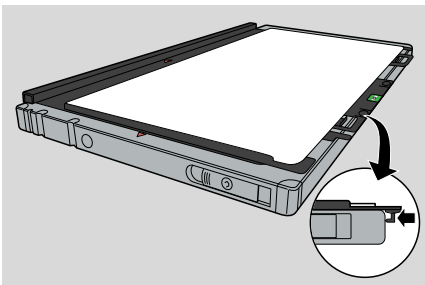


6. Puhdista kuvalevy ja alusta seuraavalla tavalla:

- Ota sopiva pyyhe tai kostuta rätти puhdistusaineeseen ja pyyhi pehmeästi ja tasaisesti **kuvalevyn pinta**.
- Anna **kuvalevyn pinnan** kuivua noin 10 minuuttia, jotta liuottimet haihtuvat.
- Puhdista **alusta** läpikotaisin käyttämällä kuivaa kangasta tai puhalla pöly pois paineilmapuhaltimella (purkki-ilmaa). (ÄLÄ KÄYTÄ ALUSTAN PUHDISTAMISEEN NÄYTÖNPUHDISTUSAINETTA.)
- Kun kuvalevyn pinta on kuiva (noin 10 minuutin jälkeen), tarkista uudelleen, ettei siinä ole hiukkasia tai muita epäpuhtauksia, ennen kuin laitat alusta-kuvalevy-yhdistelmän kasettiin.

7. Laita alusta ja kuvalevy takaisin kasettiin.

Tarkista, että valkoinen fosforipuoli on kasetin mustaa putkipuolta kohti ja ettei suljin raavi kuvalevyn pintaa.

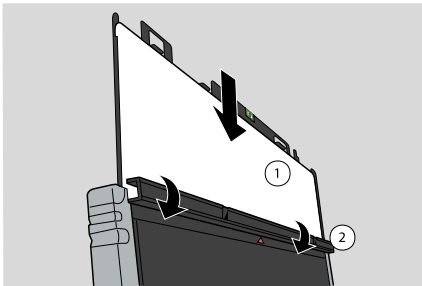


1. Valkoinen fosforipuoli
2. Kasetin musta putkipuoli



Varoitus: Varmista, että kuvalevy liikuu sisään varovasti. Älä anna levyn pudota pystysuorassa kasettiin! Tämä vahingoittaa fosforia.

8. Kun musta alusta ja kuvalevy ovat kokonaan kasetissa, sulje suljin.

Suljin suljetaan helposti työntämällä avain tai kynä kasetin lukkoon, kun suljinta suljetaan. Poista avain tai kynä kun se on kiinni.

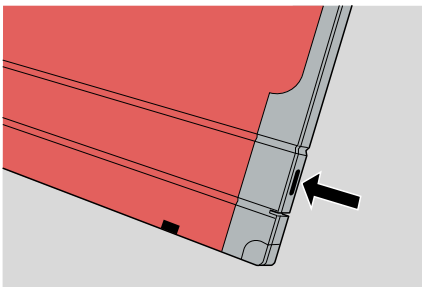

8 | CR MD4.0T:n ja CR MM3.0T:n kuvalevyn ja alustan puhdistaminen | Alustan ja kuvalevyn puhdistaminen



Kommentti: Puhdistamisen jälkeen kuvalevy on pyyhittävä ennen käyttöä.