

Anexo al DX-G, DX-M

5170/100

5170/200

Manual de uso



Contenido

Aviso legal	3
Ámbito	4
Acerca de los avisos de seguridad de este documento	5
Directrices de seguridad adicionales	6
Sistema de chasis y placa: Extremidades CR HD5.0	7
Tamaño de matriz de píxeles	7

Aviso legal



0413

 Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel - Bélgica

Para obtener más información acerca de los productos Agfa y Agfa HealthCare, puede visitar www.agfa.com.

Agfa y el rombo de Agfa son marcas comerciales de Agfa-Gevaert N.V., Bélgica o de sus filiales. DX-G y DX-M son marcas comerciales de Agfa HealthCare N.V., Bélgica o de alguna de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y se usan en forma editorial sin intención de violar derecho alguno.

Agfa HealthCare N.V. no ofrece ninguna garantía implícita ni explícita con respecto a la exactitud o utilidad de la información contenida en este manual y rechaza específicamente toda garantía de idoneidad para un fin determinado. Es posible que algunos productos y servicios no estén disponibles en su región. Póngase en contacto con el representante comercial de su localidad para obtener información sobre disponibilidad. Agfa HealthCare N.V. se esfuerza en proporcionar diligentemente información lo más precisa posible, pero no asume ninguna responsabilidad por errores tipográficos que pudiera haber. Agfa HealthCare N.V. no se considerará responsable bajo ninguna circunstancia por daños originados a raíz del uso o de la imposibilidad de uso de información, aparatos, métodos o procesos descritos en este documento. Agfa HealthCare N.V. se reserva el derecho de realizar cambios en este documento sin previo aviso. La versión original de este documento está en idioma inglés.

Copyright 2015 Agfa HealthCare N.V.

Todos los derechos reservados.

Publicado por Agfa HealthCare N.V.

B-2640 Mortsel, Bélgica.

Queda prohibida la reproducción, copia, adaptación o transmisión de cualquier forma o por cualquier medio sin la autorización por escrito de Agfa HealthCare N.V.

Ámbito

Este manual contiene información general para un uso seguro y eficaz de los digitalizadores DX-G y DX-M, denominados cada uno en adelante "digitalizador", a menos que la información haga referencia a un tipo específico.

Este manual es un anexo al Manual del usuario de DX-G y DX-M (documento 2321 o 2421).

- Directrices de seguridad
- Sistema de chasis y placa: Extremidades CR HD5.0

Acerca de los avisos de seguridad de este documento

En los siguientes ejemplos se muestra cómo aparecerán las advertencias, precauciones, instrucciones y notas en este documento. El texto explica su uso previsto.

**PELIGRO:**

Un aviso de seguridad de peligro indica una situación peligrosa de peligro directo e inmediato de una posible lesión grave a un usuario, técnico, paciente, u otras personas.

**ADVERTENCIA:**

Un aviso de seguridad de advertencia indica una situación peligrosa que puede provocar una posible lesión grave a un usuario, técnico, paciente, u otras personas.

**ATENCIÓN:**

Un aviso de seguridad de precaución indica una situación peligrosa que puede provocar una posible lesión leve a un usuario, técnico, paciente, u otras personas.



Una instrucción es una directriz cuyo incumplimiento puede dar lugar a daños en los equipos descritos en este manual y en cualesquiera otros bienes y equipos, o bien contaminación medioambiental.



Una prohibición es una directriz cuyo incumplimiento puede dar lugar a daños en los equipos descritos en este manual y en cualesquiera otros bienes y equipos, o bien contaminación medioambiental.



Nota: Las notas incluyen consejos y destacan aspectos especiales. Las notas no deben interpretarse como instrucciones.

Directrices de seguridad adicionales

Para obtener directrices de seguridad generales para el uso del digitalizador, consulte el Manual del usuario de DX-G y DX-M (documento 2321 o 2421).



ADVERTENCIA:

El funcionamiento al margen de las condiciones de entorno especificadas puede provocar un deterioro en la calidad de la imagen. Para obtener mejores resultados, mantenga las condiciones del entorno dentro de estas especificaciones.



ADVERTENCIA:

La iluminación del entorno que cae en el digitalizador puede crear imágenes que originen la necesidad de una nueva toma. No abra el digitalizador durante el funcionamiento.



ADVERTENCIA:

Para evitar riesgos de descargas eléctricas, este equipo solo debe conectarse a una red de distribución eléctrica de alimentación con protección a tierra. Compruebe la conexión con protección a tierra de forma periódica. Se recomienda encarecidamente que utilice el segundo conector a tierra para protección y que compruebe también esta conexión de manera regular.



ATENCIÓN:

Aunque se hayan tomado todas las precauciones, es posible que existan errores leves en el producto. Es poco probable que un error leve de lugar al funcionamiento incorrecto (inesperado) del dispositivo.

Sistema de chasis y placa: Extremidades CR HD5.0

El digitalizador DX-M y DX-G además es compatible con el sistema de chasis y placa de las Extremidades CR HD5.0.



Nota: El uso del chasis de las Extremidades CR HD5.0 requiere una versión de software \geq NIM_2501.

Capacidad de producción (con el ciclo de borrado predeterminado)	
La capacidad de procesamiento de chasis (placas/hora) depende del formato del chasis y se calcula a partir de la dosis de borrado de placas de imagen estándar.	24 x 30 cm (Extremidades HD5.x) 41 placas/hora
	18 x 24 cm (Extremidades HD5.x) 49 placas/hora

Tamaño de matriz de píxeles

Tipo de chasis	Formato (cm)	Resolución (píxeles/mm)	Anchura x longitud (píxeles)	Anchura x longitud (mm)
Extremidades CR HD5.0	24 x 30	20	5760 x 4512	288,0 x 225,6
	18 x 24	20	4560 x 3312	228,0 x 165,6