



1 Koko jalan ja koko selkärangan valotuksen tekeminen

- 1 Lisää koko jalka koko selkäranka (KJKS) -valotus tutkimukseen.
- 2 Laita (KJKS) CR -kasetit kasettikoteloon alla olevien kuvien mukaisesti.
Kiinnitä erityistä huomiota kasettien suuntaukseen:
 - Työnnä kasetti kasettikoteloon edestäpäin musta sivu itseäsi päin.
 - Pidä kasettia siten, että tarra on ylöspäin.

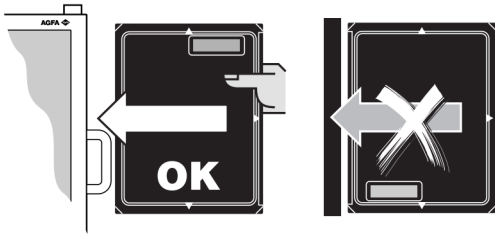

 *Kommentti: Jos kasetit asetetaan väärin kasettikoteloon, seurauksena voi olla virheitä kuvissa.*

- 3 Suorita koko jalka koko selkäranka -tutkimus.
- 4 Laita kasetit digitointilaitteeseen. Muista nimikoida osakuvat valotusten mukaan.

Kun työasema on vastaanottanut viimeisen kuvan, tutkimuksessa luodaan lisäkuva, jossa on yhdistetty FLFS-kuva.



Kommentti: Tarkista osakuvien anatomisesti oikea järjestys, jos yhdistettyä FLFS-kuvaa ei luoda automaattisesti.

Katso lisätietoja:

- NX-käyttöohjeen luku "Koko jalan ja koko selkärangan kuvien yhdistäminen"
- CR Full Leg Full Spine -käyttöohjeen luku "Perustyönkulku"