


1 Pilnīgas kājas un pilnīgas mugurkaula ekspozīcijas veikšana


1 Pievienojiet izmeklējumam pilnas kājas un pilnas mugurkaula (FLFS) ekspozīcijas komplektu.

2 Ielieciet (FLFS) CR kasetes turētājā, kā parādīts attēlos zemāk.

Pievērsiet īpašu uzmanību kasešu virzienam.

- Pagrieziet kasešu turētāju un ielieciet kasetes ar melno pusi pret sevi.
- Turiet kasetes ar marķējumu augšpusē.

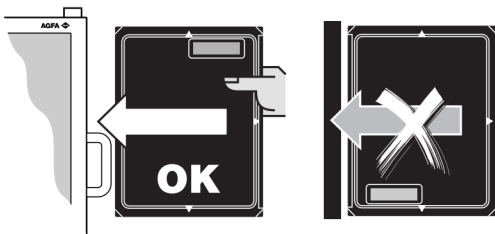

 *Piezīme: Nepareiza kasešu ievietošana turētājā izraisa artefaktus uz attēliem.*

3 Veiciet pilnu kājas un pilnu mugurkaula ekspozīciju.

4 Ielieciet kasetes digitālajā pārveidotājā. Pārlicinieties, vai daļējie attēli atbilst ekspozīcijām.

Kad darbstacijā ir saņemts pēdējais attēls, izmeklējumā tiek izveidots papildu attēls, kurā ir savienots FLFS attēls.



Piezīme: Ja savienotais FLFS attēls nav izveidots automātiski, pārbaudiet, vai daļējos attēlos ir pareiza anatomiskā secība.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet:

- NX lietošanas rokasgrāmatas sadaļu „Pilnīga kājas un pilnīga mugurkaula (Full Leg Full Spine) attēlu savienošana”
- CR Full Leg Full Spine lietošanas rokasgrāmatas sadaļa „Vispārējs darba process”