



# 1 Για να διεξάγετε έκθεση πλήρους κάτω άκρου/πλήρους σπονδυλικής στήλης

- 1 Προσθέστε το σετ έκθεσης πλήρους κάτω άκρου/πλήρους σπονδυλικής στήλης (FLFS) στην εξέταση.
- 2 Εισαγάγετε τις κασέτες CR (FLFS) στην υποδοχή κασέτας, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον προσανατολισμό των κασετών:
  - Κοιτάζοντας την υποδοχή κασέτας, εισαγάγετε τις κασέτες με τη μαύρη πλευρά προς το μέρος σας.
  - Κρατήστε τις κασέτες με την ετικέτα στο επάνω μέρος.

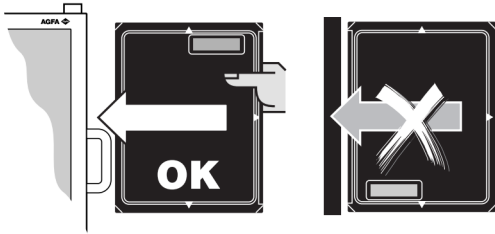

 Σημείωση: Η εσφαλμένη τοποθέτηση των κασετών στην υποδοχή κασέτας προκαλεί τεχνητά σφάλμα στις εικόνες.

- 3 Διεξαγάγετε την έκθεση πλήρους κάτω άκρου/πλήρους σπονδυλικής στήλης.
- 4 Τοποθετήστε τις κασέτες στον ψηφιοποιητή. Βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζετε τις τμηματικές εικόνες που αντιστοιχούν στις εκθέσεις.

Μετά τη λήψη της τελευταίας εικόνας από το σταθμό εργασίας, δημιουργείται στην εξέταση μια επιπλέον εικόνα, που περιέχει τη συρραμμένη εικόνα FLFS.



Σημείωση: Ελέγξτε για τη σωστή ανατομική διάταξη των τμηματικών εικόνων, εάν η συρραμμένη εικόνα FLFS δεν δημιουργείται αυτόματα.

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο:

- Εγχειρίδιο χρήστη NX, ενότητα "Συρραφή εικόνων πλήρους κάτω άκρου / πλήρους σπονδυλικής στήλης"
- Εγχειρίδιο χρήστη του CR Full Leg Full Spine, ενότητα "Βασική ροή εργασίας"