


1

Visos kojos, viso stuburo ekspozicijai atlikti

- Į tyrimą įtraukite visos kojos, viso stuburo (FLFS) nuotraukų komplektą.
- Įdėkite (FLFS) CR kasetes į kasetės laikiklį, kaip parodyta toliau pateiktose iliustracijose.
Atkreipkite ypatingą dėmesį į kasečių orientaciją:
 - Atsigręžkite į kasetės laikiklį ir įdėkite kasetes taip, kad juoda pusė būtų atgręžta į jus.
 - Laikykite kasetę taip, kad etiketė būtų viršuje.

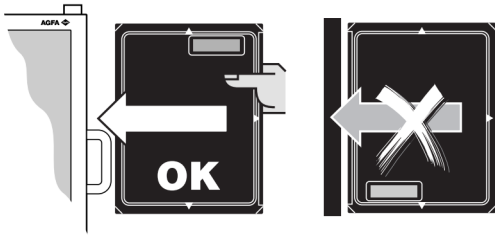

Pastaba: Dėl neteisingos kasetės padėties kasetės laikiklyje, vaizduose gali atsirasti artefaktų.

- Atlikite visos kojos, viso stuburo ekspoziciją.
- Sudėkite kasetes į skaitmeninį keitiklį. Pasirūpinkite identifikuoti dalinius vaizdus, atitinkančius ekspozicijas.

Kai darbo stotyje bus gautas paskutinis vaizdas, tyrime bus sudarytas papildomas FLFS sudurtinis vaizdas.



Pastaba: Patikrinkite, kad būtų teisinga dalinių vaizdų anatominė tvarka, jei sujungtas FLFS vaizdas nesukuriamas automatiškai.

Daugiau informacijos rasite:

- NX naudojimo instrukcijoje, skyriuje „Visos kojos, viso stuburo vaizdų sudūrimas“
- „CR Full Leg Full Spine“ naudojimo instrukcijos, „Pagrindinė darbo eiga“