


# 1 ทำการฉายแบบขา สั้นหลังเต็ม

1 เพิ่มชุดการฉายแบบขา สั้นหลังเต็ม (full leg full spine - FLFS) ลงในการตรวจ

2 ใส่คาสเซ็ท (FLFS) CR ไว้ในที่จับคาสเซ็ทตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

ตรวจสอบการจัดวางแนวของคาสเซ็ท:

- ยื่นหน้าเข้าหาที่จับคาสเซ็ทและใส่คาสเซ็ทโดยให้ด้านสีด้านเข้าหาคุณ
- จับคาสเซ็ทโดยให้ฉากอยู่ด้านบน

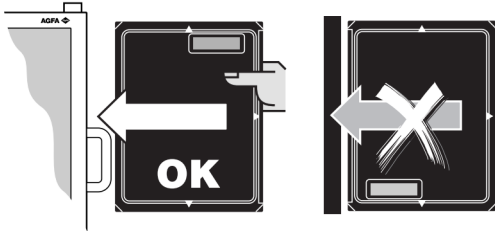

หมายเหตุ: การจัดวางคาสเซ็ทไม่ถูกต้องในที่จับคาสเซ็ทจะก่อให้เกิดสิ่งแปลกปนในภาพ

3 ทำการฉายแบบขา สั้นหลังเต็ม

4 ใส่คาสเซ็ทในดิจิทัลไซเบอร์

ตรวจสอบว่ามีภาพบางส่วนตามการฉาย

หลังจากที่ได้รับภาพสุดท้ายบนเวิร์กสเตชัน ภาพพิเศษจะถูกสร้างขึ้นในการตรวจ โดยประกอบด้วยภาพ FLFS ที่ต่อเข้าด้วยกัน



หมายเหตุ: ตรวจสอบลำดับทางกายวิภาคที่ถูกต้องของภาพบางส่วน หากภาพ FLFS ที่มีการต่อภาพไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ดูที่:

- คู่มือผู้ใช้ NX หัวข้อ "การต่อภาพขา สั้นหลังเต็ม"
- คู่มือผู้ใช้ CR Full Leg Full Spine หัวข้อ "ระบบงานพื้นฐาน"