



1 За да извършите експонация на цял крак или цял гръбначен стълб


- 1 Добавете набора от експонации за цял крак или цял гръбначен стълб (FLFS) към изследването.
- 2 Поставете CR касетите за цял крак или цял гръбначен стълб (FLFS) в държача за касета, както е показано на илюстрациите по-долу.
Обърнете специално внимание на ориентацията на касетите:
 - Застанете срещу държача за касета и поставете касетите така, че черната страна да сочи към вас.
 - Дръжте касетите с обозначението нагоре.

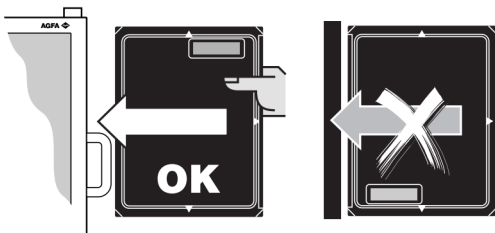

 **Забележка:** Неправилното позициониране на касетите в държача за касета ще доведе до поява на артефакти върху изображенията.

- 3 Извършете експонацията на цял крак или цял гръбначен стълб.
- 4 Поставете касетите в цифровизатора. Уверете се, че сте идентифицирали частичните изображения, съответстващи на експонациите.

След получаване на последното изображение от работната станция, в изследването се създава допълнително изображение, съдържащо същото изображение на цял крак или цял гръбначен стълб (FLFS).

 **Забележка:** Проверете правилния анатомичен ред на частичните изображения, ако същото изображение на цял крак или цял гръбначен стълб (FLFS) не се създаде автоматично.

За по-подробна информация вижте:

- Ръководство на потребителя за NX, раздел „Съшиване на изображения на цял крак или цял гръбначен стълб“
- Ръководство на потребителя за CR Full Leg Full Spine, раздел „Основен работен процес“