



1 Para realizar uma exposição da perna completa-coluna vertebral completa

- 1 Adicione a exposição definida da perna completa-coluna vertebral completa (FLFS) ao exame.
- 2 Introduza as cassetes CR (FLFS) no suporte de cassetes, como se mostra na ilustração abaixo.
Preste especial atenção à orientação das cassetes:
 - Volte-se para o suporte de cassetes e insira as cassetes com o lado preto virado para si.
 - Segure as cassetes com a etiqueta na parte de cima.

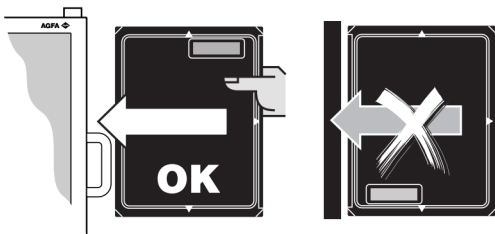

 Nota: O posicionamento incorrecto das cassetes no suporte respectivo provoca artefactos nas imagens.

- 3 Efectue uma exposição da perna completa-coluna vertebral completa.
- 4 Coloque as cassetes no digitizer. Certifique-se de que identificou as imagens parciais correspondentes às exposições.

Depois de ter sido recebida a última imagem na estação de trabalho, é criada, no exame, uma imagem adicional com a imagem FLFS (perna completa-coluna vertebral completa) colada.



Nota: Se a imagem FLFS (perna completa-coluna vertebral completa) colada não for criada automaticamente, verifique se a ordem anatómica das imagens parciais está correcta.

Para obter mais informações, consulte:.

- O Manual do utilizador da NX, secção “Colar imagens de Perna total-Coluna vertebral total”
- O Manual do utilizador do CR Full Leg Full Spine, secção “Fluxo de trabalho básico”