



1 Pour effectuer une exposition Jambe complète / Colonne complète


- 1 Ajoutez le jeu d'exposition Jambe complète / Colonne complète (FLFS) à l'examen.
- 2 Introduisez les cassettes CR (FLFS) dans le porte-cassette, comme illustré ci-dessous.
Soyez particulièrement attentif à l'orientation des cassettes :
 - Face au porte-cassette, insérez les cassettes avec le côté noir orienté vers vous.
 - Maintenez les cassettes avec l'étiquette vers le haut.

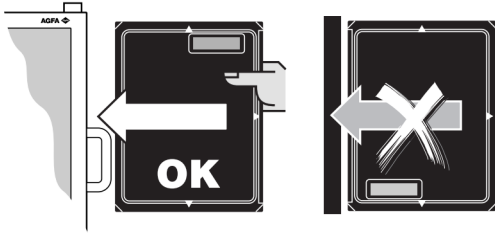

 Remarque : Positionnement incorrect des cassettes dans le porte-cassette susceptible de provoquer des artefacts sur les images.

- 3 Effectuez l'exposition Jambe complète / Colonne complète.
- 4 Placez les cassettes dans le numériseur. Identifiez précisément les images partielles correspondant aux expositions.

Après réception de la dernière image sur le poste de travail, une image supplémentaire est créée dans l'examen ; elle contient l'image FLFS assemblée.

 Remarque : Vérifiez le bon ordre anatomique des images partielles si l'image FLFS assemblée n'est pas automatiquement créée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents suivants :

- Mode d'emploi NX, section « Assemblage d'images Jambe complète / Colonne complète »
- Mode d'emploi CR Full Leg Full Spine, section « Flux de travail de base »