



1 Pentru a efectua o expunere picior-coloană vertebrală

- 1 Adăugați la examinare setul de expunere FLFS (full leg full spine - picior-coloană vertebrală).
- 2 Introduceți casetele CR (FLFS) în suport, după cum se arată în imaginea de mai jos.
Aveți mare grijă la orientarea casetelor:
 - Stați cu fața spre suport și introduceți casetele cu partea neagră înspre dumneavoastră.
 - Țineți casetele cu eticheta în sus.

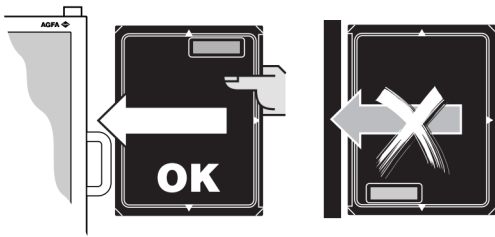

 **Observație:** Poziția incorectă a casetei în suportul aferent va duce la apariția de artefacte pe imagini.

- 3 Efectuați expunerea picior-coloană vertebrală.
- 4 Introduceți casetele în digitizor. Aveți grijă să identificați imaginile parțiale corespunzătoare expunerilor.

După primirea ultimei imagini pe stația de lucru, este creată o imagine suplimentară în examinare, care conține imaginea FLFS combinată.



Observație: Verificați dacă imaginile parțiale sunt în ordinea anatomică corectă în cazul în care imaginea FLFS combinată nu este creată automat.

Pentru mai multe detalii, consultați:

- Manualul de utilizare a NX, secțiunea „Combinarea imaginilor picior-coloană vertebrală”
- Manualul de utilizare a CR Full Leg Full Spine, secțiunea „Fluxul de lucru de bază”