



# 1 Per realizzare un'esposizione gamba intera/colonna vertebrale intera

- 1 Aggiungere all'esame il set di esposizione gamba intera/colonna vertebrale intera (FLFS, full leg full spine).
- 2 Inserire nel portacassette le cassette CR (FLFS) come mostrato nella figura qui sotto.  
Fare molta attenzione all'orientamento delle cassette:
  - Stando di fronte al portacassette, inserire le cassette con il lato nero in posizione anteriore.
  - Tenere le cassette con l'etichetta in alto.

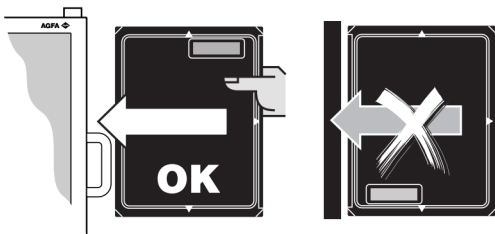

 *Nota: Il posizionamento non corretto delle cassette nel portacassette creerà degli artefatti sulle immagini.*

- 3 Eseguire l'esposizione gamba intera/colonna vertebrale intera.
- 4 Inserire le cassette nel digitalizzatore. Identificare le immagini parziali corrispondenti alle esposizioni.

Una volta ricevuta l'ultima immagine sulla stazione di lavoro, viene creata un'immagine supplementare nell'esame, contenente l'immagine FLFS montata.



*Nota: Se l'immagine FLFS montata non viene creata automaticamente, verificare la correttezza dell'ordine anatomico delle immagini parziali.*

Per informazioni dettagliate, consultare:

- Manuale utente NX, sezione "Montaggio di immagini Gamba intera Colonna vertebrale intera"
- Manuale utente CR Full Leg Full Spine, sezione "Flusso di lavoro di base"