



1 „Kogu-jalg-kogu-selg” tüüpi kiirituse tegemine


- 1 Lisage uuringule „kogu-jalg-kogu-selg” ehk KJKS (Full Leg Full Spine – FLFS) (jalg ja lülisammas täispikkuses) kiirituse komplekt.
- 2 Sisestage kassetihoidikusse (FLFS) CR-i kassetid, nagu näidatud allpool joonistel.
Jälgige hoolikalt kassetide suunda.
 - Näoga kassetihoidiku poole olles sisestage kassetid nii, et must külg jääb teie poole.
 - Hoidke kassette sildiga ülespoole.

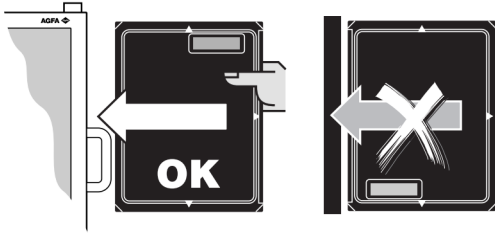

 Märkus. Kassettide vale asend kassetihoidikus põhjustab piltidel artefakte.

- 3 Tehke „kogu-jalg-kogu-selg” tüüpi kiiritus.
- 4 Asetage kassetid digitaatorisse. Identifitseerige kindlasti kiiritustele vastavad osalised pildid.

Pärast viimase kujutise vastuvõtmist tööjaamas luuakse uuringus lisakujutis, mis sisaldab mestitud FLFS-i kujutist.

 Märkus. Kui mestitud FLFS-i kujutist ei looda automaatselt, kontrollige osaliste piltide õiget anotoomilist järjekorda.

Täpsema teabe saamiseks lugege:

- NX-i kasutusjuhend, osa „Kogu-jalg-kogu-selg” kujutiste mestimine”
- CR Full Leg Full Spine'i kasutusjuhend, osa „Põhiline töövoog”