



1 Slik utfører du en helben/helrygg-eksponering

- 1 Legg til eksponeringssettet for helben/helrygg (FLFS) i undersøkelsen.
- 2 Legg inn (FLFS) CR-kassetten i kassettholderen, som vist i illustrasjonene nedenfor.
Vær spesielt oppmerksom på kassettenes retning:
 - Stå vendt mot kassettholderen, og sett inn kassetten med den svarte siden mot deg selv.
 - Hold kassetten slik at etiketten vender opp.

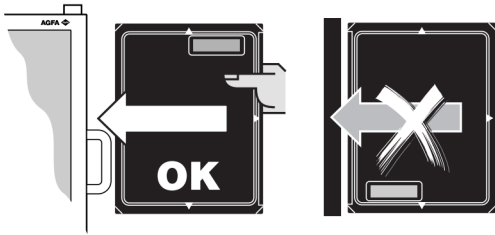

 *Merk: Feil plassering av kassetten i kassettholderen vil føre til artefakter på bildene.*

- 3 Utfør helben/helrygg-eksponeringen.
- 4 Sett inn kassetten i digitaliseringsenheten. Pass på at du identifiserer de delvise bildene som tilsvarer eksponeringene.

Etter at det siste bildet er mottatt på arbeidsstasjonen, lages det et ekstra bilde i undersøkelsen. Dette inneholder det sammensatte FLFS-bildet.



Merk: Kontroller at den anatomiske rekkefølgen til de delvise bildene er riktig hvis det sammensatte FLFS-bildet ikke opprettes automatisk.

Hvis du vil ha mer informasjon, se

- Bruksanvisningen for NX under Sammensetting av helben/helrygg-bilder
- Bruksanvisning for CR Full Leg Full Spine under Grunnleggende arbeidsflyt