



1 Expozice celých nohou a celé páteře

- 1 Přidejte do vyšetření sadu expozic celých nohou a celé páteře (FLFS).
- 2 Vložte kazety (FLFS) CR do držáku kazet tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
Zvláštní pozornost věnujte orientaci kazet:
 - Postavte se čelem k držáku kazet a vložte kazety tak, aby černá strana směřovala čelem k vám.
 - Držte kazety tak, aby byl štítek nahoře.

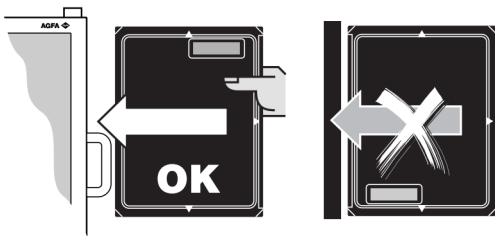

 *Poznámka: Nesprávná poloha kazety v držáku bude mít za následek artefakty na snímcích.*

- 3 Proveďte expozici celých nohou a celé páteře.
- 4 Vložte kazety do digitizéru. Nezapomeňte identifikovat dílčí snímky odpovídající dané expozici.

Po přijetí posledního snímku na pracovní stanici je v relaci vytvořen jeden snímek navíc, obsahující spojený snímek FLFS.



Poznámka: Zkontrolujte správné anatomické uspořádání částečných snímků, pokud není spojený snímek FLFS vytvořen automaticky.

Více informací naleznete v části:

- Uživatelská příručka k NX, část „Spojování snímků celých nohou a celé páteře“
- Uživatelská příručka k CR Full Leg Full Spine, část „Základní pracovní postup“