



# 1 For at udføre en FLFS-eksponering

- 1 Tilføj FLFS-eksponeringssættet til undersøgelsen.
- 2 Sæt (FLFS) CR-kassetterne ind i kassetteholderen som vist i illustrationen nedenfor.  
Vær især opmærksom på kassetternes orientering:
  - Sæt kassetterne i med den sorte side mod dig, mens du står vendt mod kassetteholderen.
  - Hold kassetterne med labelen øverst.

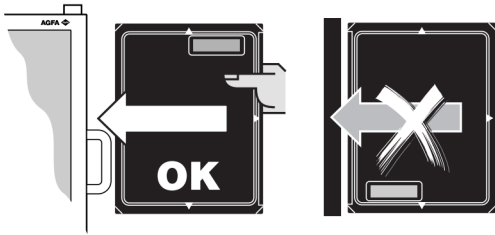

 Bemærk: Forkert positionering af kassetterne i kassetteholderen vil forårsage artefakter på billederne.

- 3 Gennemfør eksponeringen af hele benet/hel rygraden.
- 4 Sæt kassetterne ind i digitizeren. Husk at identificere de delbilleder, der svarer til eksponeringerne.

Når det sidste billede er modtaget på arbejdsstationen, oprettes der et ekstra billede i undersøgelsen, som indeholder det samlede FLFS-billede.

 Bemærk: Kontrollér for korrekt anatomisk rækkefølge af delbillederne, hvis det samlede FLFS-billede ikke oprettes automatisk.

For detaljerede oplysninger se:

- NX-brugervejledning, afsnit “Samling af billeder af hele benet / hele rygraden”
- Brugervejledning til CR Full Leg Full Spine, afsnit “Grundlæggende arbejdsforløb”