



1 Da opravite osvetlitev cele noge in cele hrbtenice

- 1 Pregledu dodajte komplet osvetlitev cela noga cela hrbtenica (FLFS).
- 2 Vstavite kaseto CR za slikanje cele noge in cele hrbtenice (FLFS), kot je prikazano na spodnji sliki. Bodite posebej pozorni na usmeritev kaset:
 - Obrnite držalo kasete in vstavite kasete vanj tako, da zadnji del kasete gleda proti vam.
 - Držite kaseto tako, da je nalepka na vrhu.

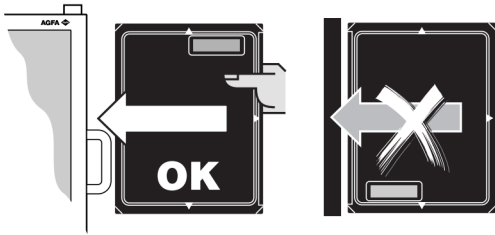

 *Opomba: Nepravilen položaj kaset v nosilcu kaset bo na slikah povzročilo popačenja.*

- 3 Opravite osvetlitev cele noge in cele hrbtenice.
- 4 Kasete vstavite v digitalizator. Pazite, da označite delne slike v vrstnem redu osvetlitev.

Ko je zadnja kaseto sprejeta na delovni postaji, se ustvari v pregledu dodatna slika, ki vsebuje sestavljeno sliko FLFS.



Opomba: Če se sestavljena slika FLFS ne ustvari samodejno, preverite pravilen anatomske položaj delnih slik.

Za podrobnejše informacije glejte:

- Uporabniški priročnik NX, poglavje »Sestavljanje slik v sliko cele noge in cele hrbtenice«
- Uporabniški priročnik CR Full Leg Full Spine, poglavje »Osnovni delovni postopek«.