


1 전체 하지 또는 전체 척추 연구 자료 촬영 방법

- 1 검사 항목에 FLFS(전체 하지 또는 전체 척추) 노출 설정을 추가합니다.
- 2 아래 그림과 같이 (FLFS) CR 카세트를 카세트 홀더에 삽입합니다.
카세트 방향에 특히 주의해야 합니다.
 - 카세트 홀더를 마주하고 카세트의 검은 면이 바라보이게 카세트를 삽입합니다.
 - 라벨이 위쪽으로 오도록 카세트를 잡습니다.

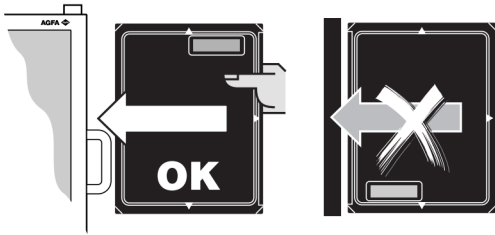

✓ 카세트 홀더의 카세트 위치가 잘못되면 이미지에 결함이 생깁니다.

- 3 전체 하지 또는 전체 척추 연구 자료를 촬영합니다.
- 4 카세트를 디지털타이저에 삽입합니다. 노출에 해당되는 부분 이미지를 반드시 식별하십시오.

마지막 이미지가 워크스테이션에 수신된 후, 이어붙인 FLFS 이미지가 포함된 추가 이미지가 검사에 생성됩니다.

✓ 이어붙인 FLFS 이미지가 자동으로 생성되지 않으면, 부분 이미지의 올바른 해부학적 순서를 확인하십시오.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

- NX 사용 설명서, “ 전체 하지 또는 전체 척추 이미지 이어붙이기 ” 절
- CR Full Leg Full Spine 사용 설명서, “ 기본 작업 흐름 ” 절