


1 Tüm bacak tüm omurga ışınlaması yapmak için

- 1 Muayeneye tüm bacak tüm omurga (FLFS) ışınlama seti ekleyin.
- 2 Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi (FLFS) CR kasetlerini kaset yuvasına yerleştirin.
Kasetlerin yönlerine özellikle dikkat edin:
 - Kaset yuvasını kendinize döndürün ve kasetleri, siyah tarafı size bakacak şekilde yerleştirin.
 - Kasetleri, etiket yukarıda kalacak şekilde tutun.

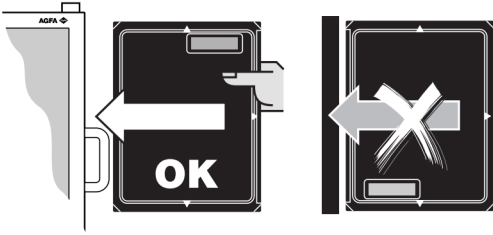

✓ *Not: Kasetlerin kaset yuvasına hatalı yerleştirilmesi görüntüler üzerinde artifaklara neden olur.*

- 3 Tüm bacak tüm omurga ışınlaması yapın.
- 4 Kasetleri sayısallaştırıcıya yerleştirin. Işınlamalara karşılık gelen kısmi görüntüleri mutlaka tanımlayın.

Son görüntü iş istasyonuna alındıktan sonra, dikişli FLFS görüntüsü muhafaza edilerek muayenede ekstra bir görüntü oluşturulur.



Not: Dikişli FLFS görüntüsü otomatik olarak oluşturulmazsa kısmi görüntülerin doğru anatomik sırada olup olmadıklarını kontrol edin.

Daha fazla bilgi için bkz.:

- NX Kullanıcı kılavuzu, bölüm "Tüm Bacak Tüm Omurga Görüntülerinin Dikilmesi"
- CR Full Leg Full Spine Kullanıcı kılavuzu, bölüm "Temel İş Akışı"