


1 Utför en exponering av komplett ben/rygggrad

1 Lägg till exponeringsuppsättningen för komplett ben/rygggrad (KBKR) till undersökningen.

2 Sätt in (FLFS) CR-kassetterna i kassetthållaren, enligt nedanstående bilder.

Var särskilt uppmärksam på hur kassetterna är vända:

- Stå vänd mot kassetthållaren och sätt in kassetterna med den svarta sidan vänd mot dig.
- Håll kassetterna så att etiketten är överst.

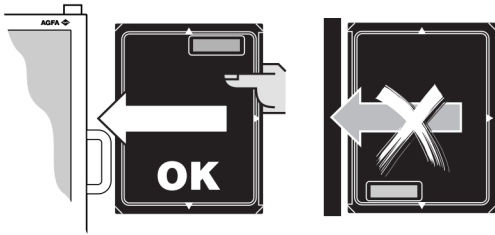

✓ *Obs: Felaktig positionering av kassetterna i kassetthållaren leder till artefakter i bilderna.*

3 Utför exponeringen av komplett ben/rygggrad.

4 Lägg in kassetterna i digitaliseringsenheten. Identifiera alltid delbilderna i förhållande till exponeringarna.

När den sista bilden har mottagits av arbetsstationen, skapas en extra bild i undersökningen som innehåller den sammansatta FLFS-bilden.

✓ *Obs: Kontrollera att delbilderna är i korrekt anatomisk ordning om den sammansatta FLFS-bilden inte skapats automatiskt.*

För närmare information, se:

- Bruksanvisning för NX, avsnittet "Sätta samman Kompletta ben/rygggrad-bilder"
- Bruksanvisning för CR Full Leg Full Spine, avsnittet "Grundläggande arbetsflöde"