



# 1 *Za snimanje cijele noge i cijele kraljeŸænice*

- 1 Dodajte niz ekspozicija cijele noge i cijele kraljeŸænice (FLFS) u pretragu.
- 2 Umetnite (FLFS) CR kasete u drŸæafç kasete kako je prikazano na slikama u nastavku.  
Posebno pazite na orijentaciju kasete:
  - Stanite prema drŸæafçu kasete i umetnite kasete crnom stranom okrenutom prema sebi.
  - DrŸæite kasete s oznakom prema vrhu.

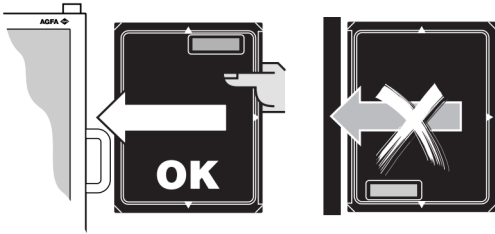

 *Napomena: Neispravno postavljanje kasete u drŸæafç kasete prouzroŸit fæe pojavu artifakata na snimkama.*

- 3 IzvrŸite ekspoziciju cijele noge i cijele kraljeŸænice.
- 4 Umetnite kasete u digitalizator. PaŸæljivo identificirajte djelomiŸne snimke koje odgovaraju ekspozicijama.

Nakon Ÿto je radna stanica primila posljednju snimku, izraŸeuje se dodatna snimka u pretrazi koja sadrŸæi spojenu FLFS snimku.



*Napomena: Provjerite ispravnost anatomskog redosljeda djelomiŸnih snimaka ako spojena FLFS snimka nije kreirana automatski.*

Za viŸe informacija, pogledajte .

- Priručnik za korisnike NX-a, poglavlje "Spajanje snimaka Full Leg Full Spine"
- Priručnik za korisnika za CR Full Leg Full Spine, odlomak "Osnovni radni proces"