



1 Para realizar una exposición de pierna completa/columna completa


- 1 Agregue al examen el conjunto de exposiciones de pierna completa/columna completa (PCCC).
- 2 Inserte los chasis (PCCC) para radiografía informatizada en el soporte para chasis, tal como se muestra en las siguientes ilustraciones.
Preste especial atención a la orientación de los chasis:
 - Colóquese frente al soporte para chasis e inserte los chasis con el lado negro orientado hacia usted.
 - Sujete los chasis de forma que la etiqueta quede en la parte de arriba.

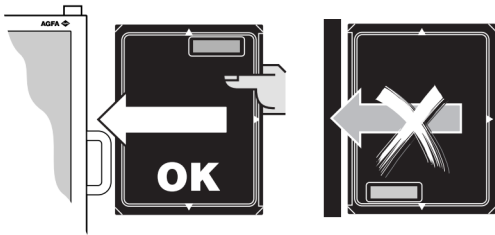

 Nota: La colocación incorrecta de los chasis en el soporte para chasis provocará defectos visuales en las imágenes.

- 3 Realice la exposición de pierna completa/columna completa.
- 4 Coloque los chasis en el dispositivo digitalizador. Asegúrese de identificar las imágenes parciales que corresponden a las exposiciones.

Después de que se reciba la última imagen en la estación de trabajo, se crea en el examen una imagen adicional, en la que aparece unida la representación de Pierna completa/Columna completa.

 Nota: Si no se crea automáticamente la imagen unida de Pierna completa/Columna completa, compruebe si es correcto el orden anatómico de las imágenes parciales.

Para obtener más información, consulte:

- la sección “Unión de imágenes de pierna completa/columna completa” en el Manual de uso de NX
- la sección “Flujo de trabajo básico” en el Manual de uso de CR Full Leg Full Spine.