


# 1 要執行全腿全脊柱曝光


1 將全腿全脊柱 (FLFS) 曝光集加入檢查。

2 如下圖所示，將「全腿全脊柱」(FLFS) CR 片匣插入片匣架。

請特別注意片匣方向：

- 面對片匣架，插入片匣，使其黑色側對著您。
- 握住片匣，使標籤朝上。

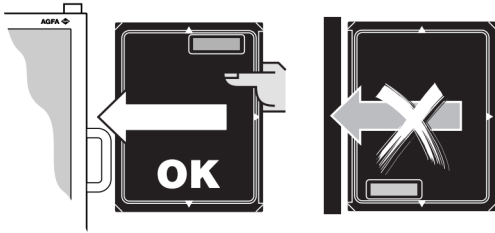

 注意：將片匣錯誤放置於片匣架中將會在影像上造成假象。

3 進行全腿全脊柱曝光。

4 將片匣放入數位化儀。請確定識別對應於曝光的部份影像。

工作站接收最後一張影像後，檢查中會建立一張額外的影像，其中包含拼合的 FLFS 影像。

 注意：如果拼合 FLFS 影像並非自動建立，請檢查部份影像的解剖順序是否正確。

有關詳細資訊，請參閱：

- 「NX 使用者手冊」的「拼合全腿全脊柱影像」一節
- 「CR Full Leg Full Spine 使用者手冊」的「基本工作流程」一節