



1 Belichting van volledig been/ volledige ruggengraat uitvoeren


- 1 Voeg de belichtingsset voor volledig been/volledige ruggengraat (VBVR) toe aan het onderzoek.
- 2 Plaats de (VBVR) CR-cassettes in de cassettehouder, zoals u op onderstaande afbeeldingen kunt zien.
Let vooral goed op de richting van de cassettes:
 - Ga met uw gezicht naar de cassettehouder staan en plaats de cassettes met de zwarte zijde naar u gericht.
 - Houd de cassettes vast met het label naar boven gericht.

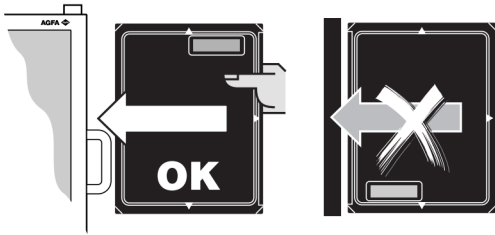

 *Opmerking: Een onjuiste plaatsing van de cassettes in de cassettehouder veroorzaakt artefacten op de beelden.*

- 3 Voer de belichting van het volledig been/de volledige ruggengraat uit.
- 4 Plaats de cassettes in de digitizer. Identificeer de afzonderlijke beelden die overeenkomen met de belichtingen.

Nadat het laatste beeld is ontvangen in het werkstation, wordt een extra beeld aangemaakt in het onderzoek, dat het samengevoegde FLFS-beeld bevat.

 *Opmerking: Verifieer de juiste anatomische volgorde van de afzonderlijke beelden als het samengevoegde FLFS-beeld niet automatisch wordt aangemaakt.*

Raadpleeg voor meer informatie:

- Gebruikershandleiding van NX, het gedeelte “Koppelen van Volledig been/volledige ruggengraat-beelden”
- Gebruikershandleiding van CR Full Leg Full Spine, het gedeelte “Basiswerkschema”