


## 1 Teljes láb, teljes gerinc expozíció elvégzése

1 Adja hozzá a FLFS (teljes láb, teljes gerinc) felvételsorozatát a vizsgálathoz.

2 Helyezze be az (FLFS) CR kazettákat kazettatartóba az alábbi ábrák szerint.

Különlegesen ügyeljen a kazetták irányultságára:

- A kazettatartóval szemben állva helyezze be a kazettákat, a fekete oldalukkal Ön felé.
- A kazettákat tartsa címkéjükkel fölfelé.

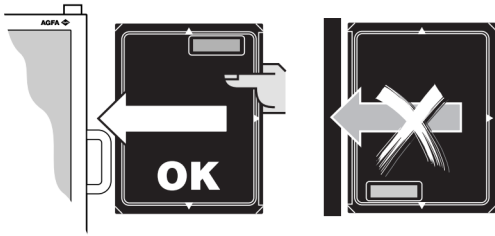

✓ *Megjegyzés: Ha a kazetták helytelenül helyezkednek el a kazettatartóban, ez műtermékeket okoz a képeken.*

3 Végezze el a teljes láb, teljes gerinc (FLFS) expozíciót.

4 Helyezze a kazettákat a digitalizálóba. Ügyeljen arra, hogy azonosítsa az expozíciókhoz tartozó részképeket.

Miután a munkahelyre az utolsó kép is beérkezett, a vizsgálathoz egy utolsó kép is készül, mely az összeillesztett FLFS képet tartalmazza.



*Megjegyzés: Ellenőrizze a részképek helyes anatómiai sorrendjét, ha az összeillesztett FLFS képet a rendszer nem hozza létre automatikusan.*

Bővebb tájékoztatás:

- NX Felhasználói kézikönyv, „FLFS (teljes láb, teljes gerinc) képek összeillesztése” c. fejezet
- CR Full Leg Full Spine (teljes láb, teljes gerinc) kézikönyv, „Alapvető munkafolyamat” c. fejezet